

# Clevy 2 tangentbord färger

Artikelnummer: 233300110

Clevy 2 är inte större än ett vanligt tangentbord, men har färre och förstorade tangenter vilket gör det lättare för personer med nedsatt synkapacitet att använda Clevy jämfört med ett konventionellt tangentbord.



## Installation och anslutning

För att installera Clevy 2 kopplar du in USB-kabeln i en ledig USB-port i datorn. Det krävs ingen installation av drivrutiner eller extra programvara, utan datorn kommer automatiskt installera det nya tangentbordet. Detta brukar ta några sekunder och sedan är det bara att sätta igång och skriva på ditt Clevy 2!

## Hur du använder Funktionstangenter på Clevy 2

Clevy 2 saknar de fysiska F-tangenterna, men genom att ändra på en liten switch på baksidan av ditt Clevy 2 kan du använda F-tangenterna genom att hålla nere F-tangenten samtidigt som du trycker på motsvarande siffertangent. **Exempel:**  $F + 1 = F1$ .

## Dräneringshål leder bort mindre spill

En finess i Clevy 2 är att tangentbordet har inbyggda dräneringshål. Om du skulle råka spilla lite vätska på tangentbordet kommer det därför kunna dränera ut vätskan och på så vis klara sig från att gå sönder.

Naturligtvis bör du under alla omständigheter försöka undvika att blöta ner ditt Clevy 2 tangentbord, men om olyckan är framme har du ett extra skydd jämfört med ett "vanligt" tangentbord.

## TILLBEHÖR

Det finns ett transparent överlägg i hårdplast som går att köpa till Clevy 2 som tillbehör:

**Artikelbenämning:** Överlägg till Clevy 2 tangentbord  
**Artikelnummer:** 237000106

**Din återförsäljare:**

**Frölunda Data AB**

Tel: 031-769 55 60

Hemsida: [www.frolundadata.se](http://www.frolundadata.se)

E-post: [info@frolundadata.se](mailto:info@frolundadata.se)