


GoTalk[®] 32+ *user's guide*

Inspelningstid:
 10 sekunder per
 meddelande
 17 sekunder per
 standardfras

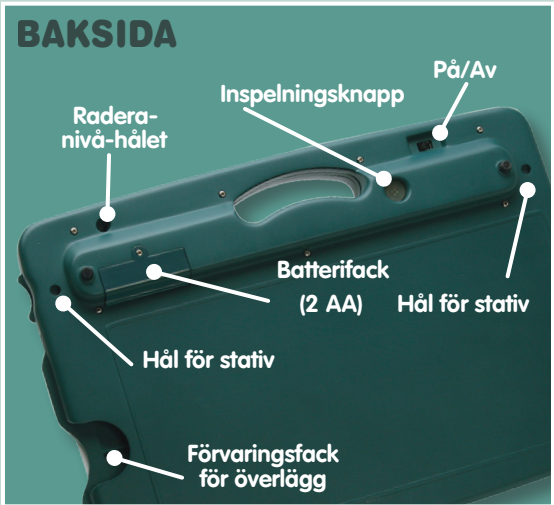

fd. FRÖLUNDA DATA

Vikt: 0.95 kg
 Storlek: 36.2 cm x 25.4 cm x 4.1275 cm
 Total inspelningstid: över 27 minuter

GoTalk 32+

GoTalk 32+ är en samtalsapparat med möjlighet att spela in flera meddelanden i olika nivåer. Du avgör vilken fras, mening eller ljud som skall spelas in till varje ruta och även vilken bild eller ord som skall representera meddelandet. Skriv ut egna överlägg (med bilder eller ord) och gör ett par inspelningar - sedan är GoTalk 32+ redo att börja användas!

Nivåer

GoTalk 32+ har fem nivåer; varje nivå lagrar en uppsättning av 32 meddelanden. Knappen för att byta nivå sitter på framsidan, till höger om handtaget. De fem numrerade LED-lamporna indikerar med grönt ljus vilken nivå som är aktiv. Tryck på nivåknappen för att växla mellan de olika nivåerna.

Ett särskilt nivååls kan användas för att förhindra ofrivillig nivåändring. Hur du låser GoTalk 32+ till en specifik nivå beskrivs under **Låsinställning**.

Volym

Volymknapparna sitter på framsidan, till vänster om handtaget. Ett pip låter när du justerar volymen, för att signalera ljudnivån.

Standardfraser

Meddelanden som spelas in på rutorna för standardfraser är samma oavsett vilken nivå som används. Dessa tre rutor har 17 sekunder inspelningstid vardera. Överlägget för dessa rutor är separerat från de övriga rutorna.

Spela in meddelanden

Rutorna har 10 sekunders inspelningstid. Sätt på GoTalk 32+: alla LED-lamporna tänds en gång, enheten piper till och slutligen lyser en grön LED upp vilken nivå du befinner dig på. Håll inne inspelningsknappen (på baksidan); en LED för nivån och den röda inspelningslampan börjar lysa. Medan båda lamporna är tända trycker du på den ruta du vill spela in meddelandet för; den röda lampan blinkar till för att indikera att inspelning pågår. Tala in det meddelande och tryck på valfri ruta för att avsluta inspelningen. För att lämna inspelningsläget trycker du på inspelningsknappen en gång till; båda lamporna skall då slockna. Det finns ett lås som förhindrar inspelning, se Låsinställning för mer information.

Spela upp meddelanden

Tryck på en ruta för att spela upp dess inspelade meddelande.



Radera meddelanden

För att radera meddelanden, spelar du över dem med en ny inspelning.

Tryck på inspelningsknappen. Tryck först på rutan med meddelandet du vill radera, sedan snabbt på en ruta igen för att göra en "tom" inspelning.

För att radera alla meddelanden på en nivå trycker du på inspelningsknappen. Använd ett gem eller liknande och peta in i hålet märkt "Erase level" på baksidan av GoTalk 32+. Den röda inspelningslampan tänds och den gröna nivålampan släcks. Alla meddelanden på nivån kommer nu raderas. Radera nivå tar inte bort standardfraserna.

Låsinställning

Förhindra ofrivilliga inspelningar och nivåbyten

Nivålås — För att aktivera nivålåset håller du inspelningsknappen intryckt till dess att både den röda lampan och den gröna nivålampan lyser utan att blinka, samtidigt som du trycker en gång på sänk-volymsknappen. Lamporna slocknar för att indikera att nivålåset är aktiverat.

Inspelningslås — För att aktivera inspelningslåset håller du inspelningsknappen intryckt till dess att både den röda lampan och den gröna nivålampan lyser utan att blinka, samtidigt som du trycker en gång på sänk-volymsknappen. Lamporna slocknar för att indikera att inspelningslåset är aktiverat.

För att **inaktivera** inspelnings- och nivålåset stänger du av GoTalk. När den är avstängd håller du inspelningsknappen intryckt, samtidigt som du startar upp enheten igen. Ett pip signalerar när du släpper inspelningsknappen. Inspelnings- och nivålåsen är nu inaktiverade.

Stativ

Två stöd med gummifötter medföljer. Använd dessa om du vill ge enheten en liten lutning, genom att skruva i dem i stativhålen på baksidan.

Batterier

GoTalk 32+ använder två AA-batterier (inkluderas).

Förvaringsfack för överlägg

Överlägg för nivåer som inte används kan lagras i förvaringsfacket på baksidan av enheten.

