

# Trackball Mini G&T

Artikelnummer: 209000150 (styrkula i mitten)

Artikelnummer: 209000151 (styrkula i höger)

Artikelnummer: 209000152 (styrkula i vänster)

Trackball Mini G&T är en väldigt liten trackball som är speciellt anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga, men fungerar även bra för små barnhänder.



## Installation & anslutning

Trackball Mini G&T installeras automatiskt när du ansluter kabeln till en ledig USB-port i datorn. Det krävs inga särskilda drivrutiner eller programvara för att använda Trackball Mini G&T.

## Knapparnas funktion

**L** = motsvarar vänster musklick på en konventionell datormus

**R** = motsvarar höger musklick på en konventionell datormus

**2L** = motsvarar dubbelklick på en konventionell datormus

**LH** = särskild låsknapp som ger "Dra-och-släpp"-funktion. Ett klick på denna knapp räcker för att t.ex. kunna flytta objekt och filer mellan olika fönster på skärmen. På så vis slipper användare hålla L-knappen nedtryckt och kan fokusera helt på att rulla styrkulan till rätt läge.

**Din återförsäljare:**

**Frölunda Data AB**

Tel: 031-769 55 60

Hemsida: [www.frolundadata.se](http://www.frolundadata.se)

E-post: [info@frolundadata.se](mailto:info@frolundadata.se)