


Kom-igång Guide

Irisbond Oskol Windows



Oskol har två utgångar, en för din smarta enhet och en till din Hiru.

1. Separera flärparna och framdelen på toppen av din Oskol.
2. Sätt i din enhet rakt ner i Oskol, med flärparna bakom enheten. Oskol ska sitta tajt, och du kan behöva trycka lite för att få ner din platta ordentligt.
3. När din platta är på plats, släpp flärparna upptill och vik dem över toppen av plattan.
4. Anslut Hiru till din platta med de tillhörande kablarna på höger sida av Hiru och din platta.

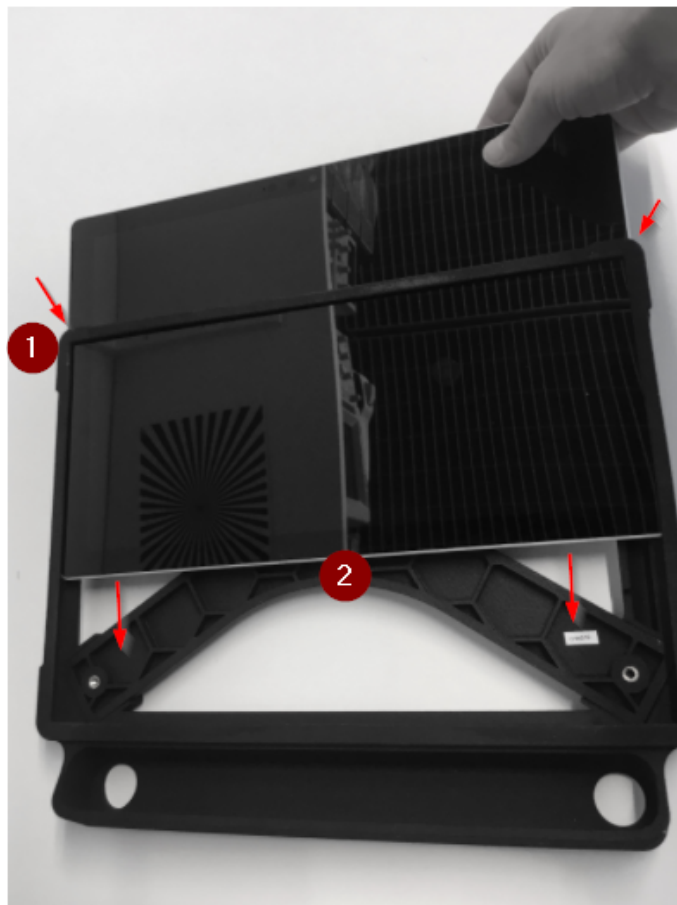

Kom-igång Guide

Irisbond Oskol iOS

Oskol har två utgångar, en för din iPad och en till din Hiru.

1. Separera flärparna och framdelen på toppen av din Oskol.
2. Med din iPads laddningsport på höger sida, sätt i iPaden rakt ner i din Oskol. Flärparna ska vara bakom din iPad. Oskol ska sitta tajt, och du kan behöva trycka lite för att få ner din platta ordentligt.
3. När din platta är på plats, släpp flärparna upptill och vik dem över toppen av plattan.
4. Anslut Hiru till din iPad med den tillhörande USB-kabeln, adaptern och hubben. Placera hubben mellan baksidan av din iPad inuti Oskol-skalet. Se nedan bild t.h.

