

IRIS SOL Talande Kalenderklocka



Bruksanvisning

Innehållsförteckning

1. Introduktion	3
2. Översikt	3
I paketet	3
Kontakter på sidan	4
Framsidan	4
Baksidan	4
3. Kom igång	5
Placering	5
Anslutning	5
4. Daglig användning	5
Klockan	5
Ljudstyrka	5
Påminnelser	5
5. Lägg till påminnelser	6
6. Ändra en påminnelse	8
7. Radera en påminnelse	8
8. Inställningsmeny	8
Tillgång	8
Klocka	9
Visning	10
Påminnelse	12
9. Grundinställningar	13
Öppna för volymkontroll och fabrikinställningar	13
Koppla ihop med FlexiBlink LIFE	13
Koppla ihop enheter	13
10. Viktig information	15
Säkerhet	15
Rengöring	15
Återvinning	15
Användningsbegränsningar:	15
11. Försäkran om överensstämmelse	15
12. Tekniska data	15
13. Felsökning	16
14. Tillbehör	16

1. Introduktion

Kalendern IRIS SOL är en elektronisk kalender med en talende klocka som har möjlighet att visa information om dag, datum och tider på dygnet. SOL har en kalenderfunktion där man kan lägga in påminnelser på datum/dag/tidpunkt.

Påminnelserna kan varnas med ljud, ljusblink, symboler och talmeddelanden om man önskar det.

SOL är speciellt utvecklat för personer med kognitiv funktionsnedsättning och kan anpassas till individuella behov.

Genom skärminställningar kan du själv välja bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du önskar på SOL.

SOL kommer färdig till användning, och allt du behöver göra, är att koppla in strömmen med strömförsörjaren som följer med.

Vid uppstart, om klockan inte är ställd, kommer skärmen gå direkt till sidan med möjlighet att justera tid och datum.

Alla grundläggande inställningar är låsta för användaren, du måste låsa upp inställningsmenyn (omkopplare nr. 5) för att komma

till menyn för inställningar. Se kapitel 9.

SOL har ett inbyggt batteri som gör att inställningarna blir kvar även vid strömavbrott.

SOL kan också arbeta med utvalda produkter från Vestfold Audio's FlexiBlink LIFE serie för att få: fjärrstyrd uppläsning av tid, brandlarm och påminnelsemeddelanden i FlexiBlink LIFE mottagaren i hemmet.

Mer information finns i kapitel. 14.

2. Översikt

I paketet




SOL LIFE
Med avtagbar fot och monteringsfäste till vägg



Strömförsörjare


Kontakter på sidan

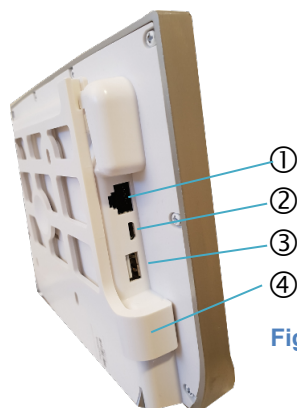

Figur 1 Höger sida

- ① Ethernet (för anslutning till router)
- ② Används inte
- ③ USB (för USB-minne)
- ④ Väggfäste


Framsidan

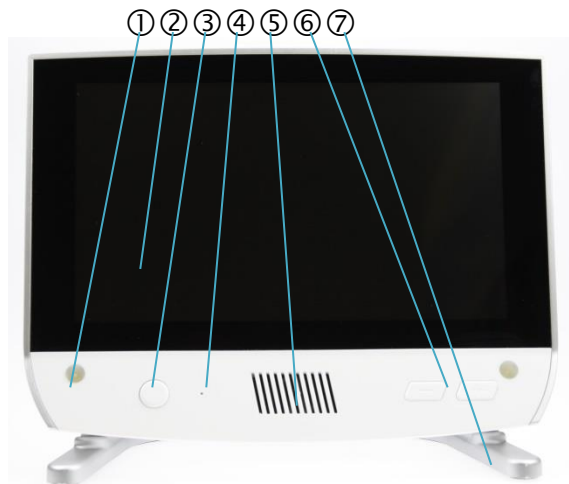

Figur 2 Framsidan

- ① Varningsljus (Höger och vänster sida)
- ② Skärm med touch
- ③ HEM knapp
- ④ Mikrofon för röstinspelning
- ⑤ Högtalare
- ⑥ Volym upp/ner (+/-)
- ⑦ Avtagbar fot

Baksidan

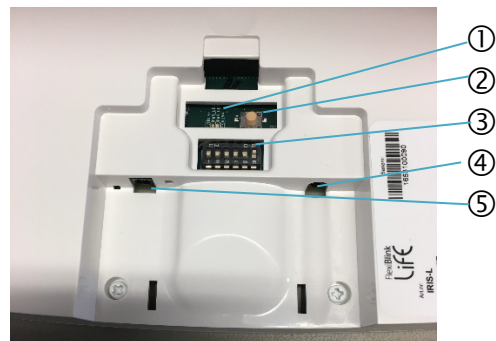

Figur 3 Baksidan

- ① Ljusindikator
- ② LIFE-knapp (Sammankoppling)
- ③ Funktionsomkopplare
- ④ Ljudutgång för teleloop / streamer
- ④ Anslutning till strömförsörjning

3. Kom igång

Placering

SOL kan stå på ett bord i den medföljande foten, eller skruvas upp på vägg med det medföljande väggfästet.



Tips

Montera inte väggfästet innan du har kontrollerat att nätsladden är tillräckligt lång.

Anslutning

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget och sätt i sladden på baksidan av SOL. Nu kommer du se att skärmen startar.

SOL är nu redo att användas, men det kan vara nödvändigt att ställa in klockan och datumet, eller anpassa produkten till användaren. Se kapitel 8 och 9.

4. Daglig användning

Klockan

Användaren behöver inte göra någonting med produkten själv.

Om du tar på skärmen kommer klockinformation (tid/ veckodag/ tiden på dygnet) att läsas upp. Det är möjligt att endast välja uppläsning av informationen som visas på skärmen.

Ljudstyrka

För att justera volymen stänger du först av låsbrytaren. Se kapitel 9. Skjut omkopplaren 5 *nedåt*.



När omkopplaren är i nedåtläge fungerar volymknapparna (plus / minus) på höger sida. När rätt volym har uppnåtts kan funktionen låsas igen, detta genom att skjuta omkopplaren 5 *uppåt*.

Påminnelser



Påminnelserna visas på en separat skärm samtidigt som ett ljud spelas upp.

Om ett röstmeddelande har spelats in kommer det automatiskt att läsas upp, om varningslampan lyser kommer dessa att blinka.

Vad som visas på sidan bestäms av inställningarna. Se kapitel 8. Påminnelsen stannar på skärmen i 30 minuter.

Om du tar på skärmen visas klockan med en symbol, att en påminnelse finns. Tryck igen för att spela upp meddelandet på nytt, eventuella nya påminnelser

under denna period kommer att "ta över".

5. Lägg till påminnelser

Om du trycker på HEM-knappen så visas en påminnelseikon längst ned till vänster på skärmen.



Tryck på ikonen för att visa listan med påminnelser. Ikonen kan döljas för att låsa påminnelsefunktionen. Se kapitel 8.


Det kan vara flera sidor med påminnelser, men det visas endast 5 per sida.



1) Tryck på + *Lägg till* i det övre högra hörnet för att lägga till en påminnelse. SOL har några färdiga förslag med påminnelser som du kan använda som utgångspunkt, eller kan du välja "Allmänt".





2) Tryck på en av ikonerna. Du kommer nu att se bilden för att lägga till en påminnelse.

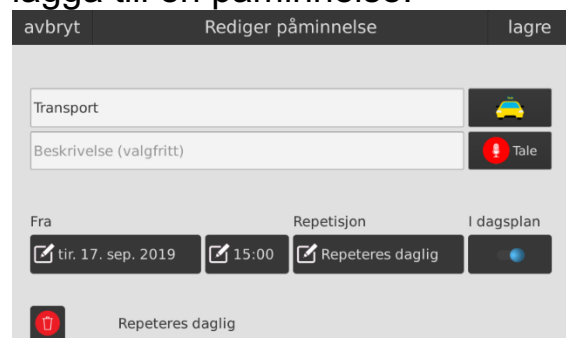

Det finns två rader för text -rad 1 måste alltid fyllas i.

Tryck på symbolfältet till höger om rad 1 för att välja vilken symbol som ska visas tillsammans med texten.


Tryck på talfältet för att tala in ditt personliga röstmeddelande.

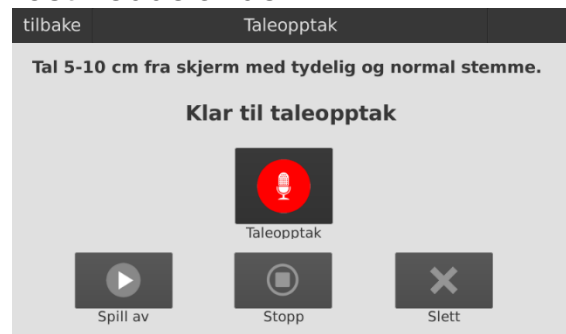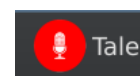

För att spela in ett nytt röstmeddelande måste ett


gammalt röstmeddelande raderas först.

Tryck på datumfält för att ange ett påminnelse datum. Tryck på OK. OBS! I datumfältet är det möjligt att välja 5 år fram i tid.

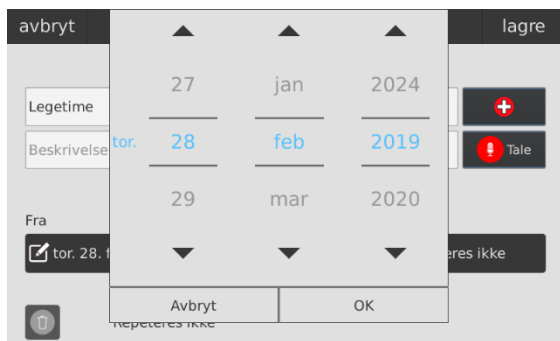

Tryck på *Tidsfältet* för att ange tiden för önskad påminnelse. Tryck på OK.

3) För att upprepa påminnelsen, tryck på fältet *Upprepa*:

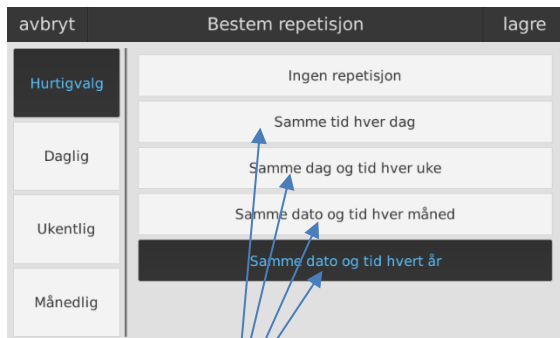

Här är fyra snabbval för repetitioner, som används för den angivna tiden som utgångspunkt.

Alternativt kan du välja upprepa dagligen, varje vecka eller varje månad.



Välj vilka dagar påminnelsen skall upprepas och eventuellt en intervall. Du kan också tidsbegränsa varningarna inom tid och datum.

4) Använd skjutreglaget för att välja om påminnelsen ska visas i det dagliga schemat (se separat avsnitt "Dagligt schema").

Tryck *Spara* eller *Avbryt*.

5) Du kan slå på och av påminnelser med det blå skjutreglaget till höger i listan.



6. Ändra en påminnelse

Om du trycker på HEM-knappen så visas en påminnelseikon längst ned till vänster på skärmen. Tryck på ikonen för att visa listan med påminnelser. Det kan vara flera sidor med påminnelser, det visas 5 st per sida.

Tryck på påminnelsen du vill ändra, gör dem ändringar du vill ha (se kapitel 5) och tryck på *Spara*.

7. Radera en påminnelse

Om du trycker på HEM-knappen så visas en påminnelseikon längst ned till vänster på skärmen. Tryck på ikonen för att visa listan med påminnelser.

Tryck på den påminnelsen du önskar att radera.



Tryck på den röda papperskorgen för att radera. Bekräfta genom att välja *Ta bort*.

8. Inställningsmeny

Tillgång

SOL har en inställningsmeny som är låst för användaren med en låsknapp, enligt beskrivningen i kapitel 9.

Skjut omkopplaren 5 *nedåt* för att öppna inställningarna.



Om du trycker på HEM-knappen så visas en ikon med texten *Inställningar* i det nedre vänstra hörnet på skärmen.



Tryck på ikonen och inställningsmenyerna visas nu som ikoner på skärmen.




Klocka



På den här sidan hittar du inställningar om klocka, datum och relaterade funktioner.

Ställ klockan

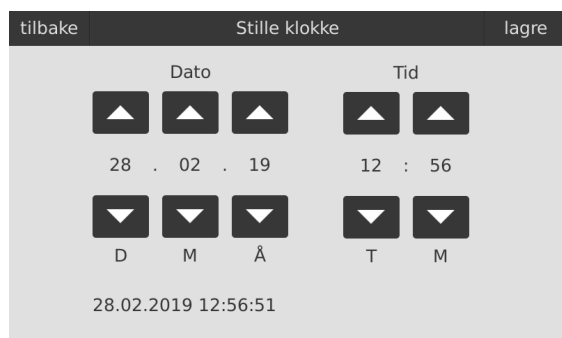

Använd pilknapparna för att ändra datum och tid. Tryck på *Spara* för att spara inställningen eller på *Tillbaka* för att avbryta.


Klocktal



Slå på eller av samtalsklockan, välj om informationen i röstmeddelandet är begränsat till vad som visas på skärmen.

Sommartid

SOL växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid.

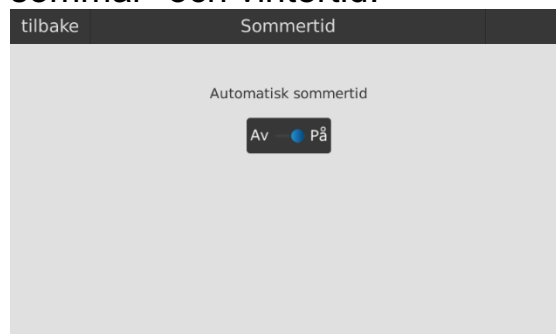

För att vara redo för ett förväntat internationellt upphörande att växla mellan sommar- och vintertid, finns det en omkopplare som stänger av den funktionen.

Nattläge

Med den här funktionen kan du själv definiera dag- och nattid, funktionen används främst av de som vill ha symboler för 24-timmars orientering istället för klockvisning. Val av symbolvisning sker under displayinställningar (se separat avsnitt «Display»).

Standardinställningarna för nattid är kl 00:00 till 06:00. (Giltigt val för början av natt är mellan 18:00 till 00:00. Giltigt val för början av dag är mellan 05:00 og 10:00).




Utseende (klockans utseende)



På den här sidan hittar du inställningarna för utseendet på skärmen.

Bakgrund

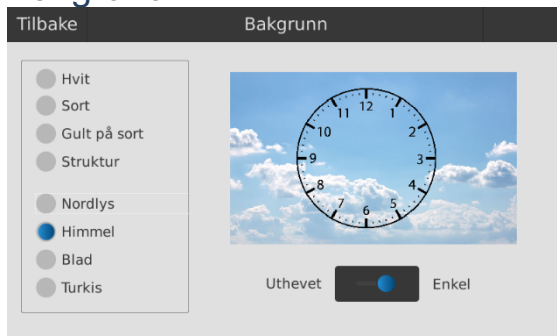

Här väljer du klockans utseende, varje utseende består av en bakgrund och en text/klocka i utvalda färger för att få bästa möjliga kontrast. Urtavlan har två val, fet stil eller enkel stil. Det utseende du väljer markeras med en blå prick. Inställningarna sparas automatiskt när du trycker på *Tillbaka*.

Visning



Du kan välja mellan fyra olika layouter för hur klockan ska visas.

1. Endast text.
Här visas tiden endast i form av informativ text.
2. Enkel Klocka
Här visas en stor klocka med valbar information längst ner.
3. Informativ
Klockan visas här med valbar information i fyra fält.
4. Dagligt schema
Här visas klockan tillsammans med en översikt över dagens kommande påminnelser.

Alla fyra layouter kan anpassas. Välj först layout och tryck sedan på *Anpassa*.

Omslagsbilden visas nu med blå «pennikoner» i de positioner som kan ändras.



När du trycker på "pennikonen" visas en lista över vad som kan visas i denna position på skärmen. Valen sker omedelbart, så du kan prova dig fram till den bild som passar användaren bäst.


Alla layouter har en vy som skiljer mellan dag och natt.

Tryck på dem vita pilarna högst upp på skärmen för att bläddra mellan det som visas under dag och natt.




Dagligt schema

Det dagliga schemat visar en översikt över dagens kommande påminnelser, om detta har valts under själva registreringen av påminnelsen /erna.

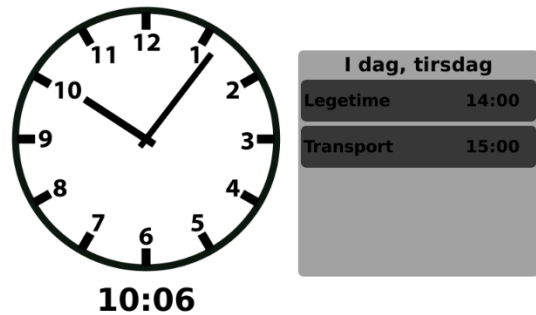

Om du inte använder det dagliga schemat som en fast visning på skärmen, kan du enkelt få en översikt över kommande aktiviteter genom att trycka på "HEM"-knappen och sedan välja "kalender". För att komma åt "kalender" måste knappen för detta vara påslagen (se avsnitt "Påminnelser").

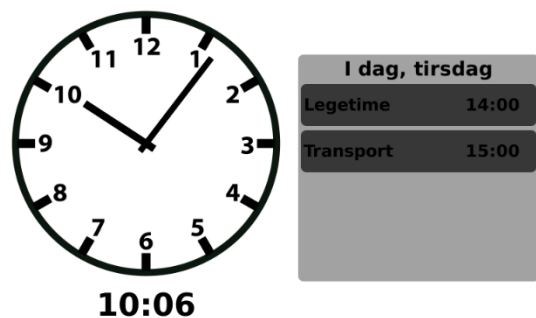

Ljusstyrka



Här väljer du skärmens ljusstyrka och meddelande för påminnelser med blinkande lysdiod.


Inställningarna sparas automatisk.

Påminnelse



Här kan du välja om tiden ska visas i påminnelse-skärmen, om menyknappen (ikonen) ska visas på skärmen och om klockan ska läsas upp.

System

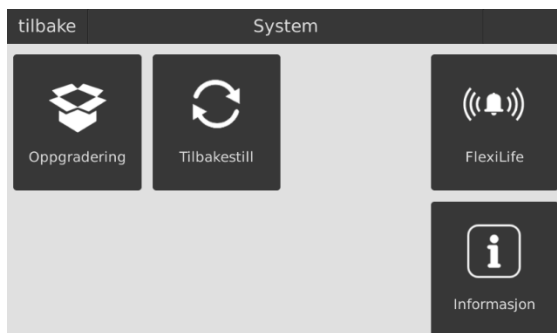

SOL är i grunden underhållsfri och det finns inga licenser eller

liknande som måste förnyas. Programvaran är ansluten till produkten.

Om det finns en ny version av programvaran från Vestfold Audio som du vill använda dig av, kan den hämtas gratis från Internet.

Om du har fått en specialanpassad programvara kan den sättas in via ett USB-minne enligt beskrivningen nedan.

Uppdatera

Programvaran (SW) kan uppdateras härifrån, antingen via kabel till internetrouter eller via USB.

Kontakta Vestfold Audio AS vid behov av hjälp.

Återställ

Här kan du återställa SOL till fabrikinställning.

FlexiBlink LIFE



Här kan du välja om SOL ska anslutas till FlexiBlink LIFE-serien i hemmet.

När *ta emot* är på, kommer SOL att få fjärravläsning av klockan och den kommer varna om brandlarm från röklarm och brandsändare i FlexiBlink LIFE-serien.

När sändaren står på skickas ett meddelande till FlexiBlink LIFE mottagaren när en påminnelse inträffar.

Information

Information om programversion och mer visas här, detta är information som endast används till förfrågningar till Vestfold Audio AS.

9. Grundinställningar

Öppna för volymkontroll och fabrikinställningar



Skärmlås – strömbrytare 5

Brytare 5 är för att låsa volym och menyer. Genom att skjuta omkopplaren 5 upp låses volymen till aktuell nivå. Den inställningen bibehålls även efter ett strömavbrott. När du försöker justera volymen eller systeminställningarna kommer skärmen att meddela att funktionerna är låsta.

Koppla ihop med FlexiBlink LIFE


Om du vill använda SOL med varningar från FlexiBlink LIFE-serien måste du koppla ihop enheterna.

Koppla ihop enheter


Alla FlexiBlink LIFE enheter som ska fungera tillsammans måste kopplas ihop. Detta gör du genom att trycka på LIFE-knappen som är placerad under locket på baksidan av SOL.

Första anslutningen


1. Tryck **två** gånger på LIFE-knappen på en av enheterna.

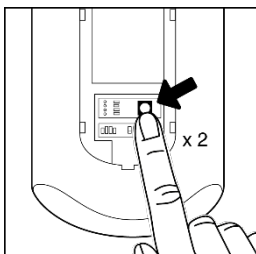

2. Tryck **én** gång på LIFE-knappen på den andra enheten.

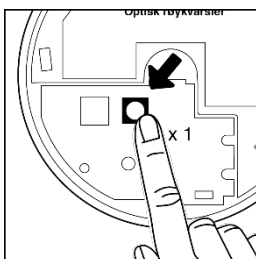

3. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.

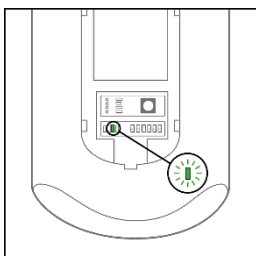

4. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser grönt i 2-3 sekunder.
5. Enheterna är färdiga att användas.

Tryck på «Test»-knappen på den ena sändaren för att kontrollera sammankopplingen.

Anslutning av en ny enhet till ett befintligt system

1. Tryck **två** gånger på LIFE-knappen på enhet från det befintliga systemet.
2. Tryck **én** gång på LIFE-knappen på den *nya* enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är färdiga att användas.

Tryck på «Test»-knappen på den en sändaren för att kontrollera sammankopplingen.


Sammankopplingen misslyckades

Om du får ett grönt ljus och sedan ett rött ljus i den nya enheten när den kopplats ihop, så misslyckades sammankopplingen. Återställ då enheten.

Om enheten lyser med ett fast rött ljus länge, betyder det att enheten redan är ansluten till ett annat nät. Återställ då enheten innan du provar sammankoppla på nytt.

Avbryt sammankopplingen

För att avbryta sammankopplingen, Tryck **en** gång på LIFE-knappen.

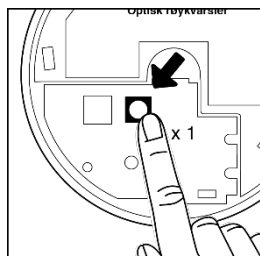

Nollställ sammankopplingen

Tryck **fem** gånger på LIFE-knappen på enheten du önskar radera sammankopplingen från, när sammankopplingen är raderad bekräftas det med röda och gröna blinkningar.

10. Viktig information

Säkerhet

Undvika att utsätta produkten för lågor och andra direkta värmekällor.

Produkten får inte kortslutas eller skruvas loss.

Produkten får inte doppas i vatten eller utsättas för vattenstänk/regn.

Rengöring

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Återvinning

Produkten får inte kastas med restavfall.

Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter.

Med korrekt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.



Användningsbegränsningar:

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

11. Försäkran om överensstämmelse

Vestfold Audio AS förklarar att SOL överensstämmer med direktiven (MDR) 2017/745.

Den fullständiga texten på överensstämmelse finns på följande internetadress:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

12. Tekniska data

Dämpa.(bxhxd): 220x165x40mm
(utan väggfäste och fot)

Strömförbrukning: 5W

Spänningsingång: 15VDC

Radiofrekvens: 868.1–869.85
MHz

Sändareffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: 0°C – 40°C -

Icke-kondenserande

Användning inomhus

13. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Klockan visar fel tid eller datum	Klockan eller datumet är inte inställt.	Ställ klockan. Se kapitel 8.
Klockan visar fel tid efter ett strömavbrott	Klockbatteriet är slut på ström.	Klockbatteriet laddas under en lång tid. Batteriet bör laddas i minst 4 dagar.
Enheten fungerar inte	Strömförsörjning är inte ansluten.	Kontrollera att strömförsörjningen är i ett eluttag och att den är ansluten till enheten.
Öppnar inte Meny inställningar	Brytare nr 5 i den lilla omkopplarraden på baksidan är i UPP-läge.	Skjut omkopplaren NED.
Kan inte justera volymen	Brytare nr 5 i den lilla omkopplarraden på baksidan är i UPP-läge.	Skjut omkopplaren NED.
Tal klockan fungerar inte	Funktionen är avstängd i inställningarna.	Se kap. Feil! Fant ikke referansekilden. för Klocktal
Påminnelser meddelas inte / visas inte	Påminnelsen är inte aktiv.	Slå på påminnelsen med skjutreglaget. Se kapitel 5.
	Tidpunkten är fel.	Se till att påminnelsen är inställd på rätt datum och tid. Se kap 6.
Påminnelsen upprepas inte	Påminnelsen är inte inställd på rätt dag / datum / tid.	Se till att påminnelsen är inställd med rätt upprepning.

För support kan du skicka ett mejl till support@frolundadata.se eller ringa oss på telefon: **010-405 68 55**

14. Tillbehör

IRIS SOL LIFE kan samarbeta med flera produkter i FlexiBlink LIFE - serien, för att ge användaren extra driftstöd.

Fjärrstyrt tal

För användare som har begränsad motorik eller rörelsehinder kan det vara bra att få klockan avläst utan att behöva röra vid skärmen.

Följande alternativ kan användas:

ARM-L

Armbandssändare för fjärrstyrd uppläsning av klockan,



FLEXI-L

En tryckknapp för fjärrstyrd uppläsning av klockan,



Automatisk uppläsning

Användare som har problem med tiden på dagen, och som kan ha en tendens att oavsiktligt gå på natten, kan få klockan att avläsas automatiskt med hjälp av sändare med rörelsesensor.

PASSAKT-L

Tidsbestämda aktivitetsvarningar med PIR, med fjärrstyrd automatisk läsning av klockan.



Extra påminnelser

Användaren kommer inte alltid att vara nära den elektroniska kalendern när en påminnelse inträffar, och det finns alltid en möjlighet att användaren inte ser på skärmen förrän tiden har gått. Genom att använda en eller flera Aurora-mottagare i hemmet meddelas användaren att det finns en påminnelse i den elektroniska kalendern.

AURORA-L

Varningsmottagare för mottag av meddelande, om att det finns påminnelser på den elektronisk kalender.

