

Kom igång

Installation

- Om inte Predictable finns installerat på din enhet, ladda ner Predictable 6 från App Store.
- Skapa konto i Predictable 6.
- Anslut din Hiru.

Kom ihåg att när du ansluter Hiru till iPad, bör du använda USB-C-kabeln med Hiru och adaptorn eller hubben ansluten till iPad. Du kan också kontrollera om Hiru är korrekt ansluten och känns igen av iPad i iPad-inställningar, leta efter "Ethernet". Se till att alla andra appar är avslutade, även kalibreringsappar. Du behöver inte kalibrera din Hiru innan du aktiverar Predictable.




Starta Predictable

1. Öppna Predictable och logga in.
2. Klicka på kugghjulet på höger sida.
3. Gå till Tillgänglighet - Ögonstyrning. Här behöver du använda touch för att styra menyn. Välj Kalibrering.
4. Kalibrera din Predictable.
5. Ställ in ditt val av trigger.

För att sedan nå inställningarna i Predictable från tangentbordet, klicka på ögat till höger.

Se film för dessa inställningar på vår hemsida på <https://frolundadata.se/butik/hiru-eyetracker-for-ios-windows/>

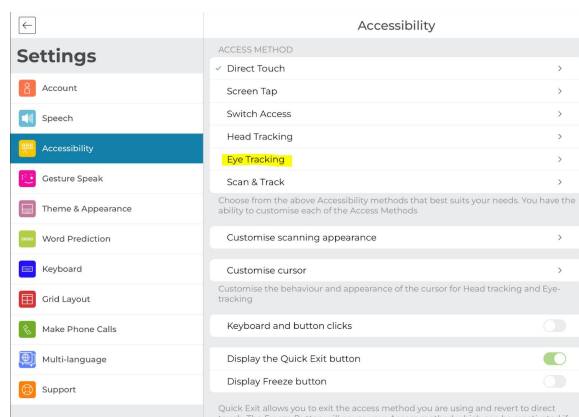



IRISBOND
see it possible

FRÖLUNDADATA

Hjälpmedel | Anpassning | Utbildning

support@frolundadata.se

info@frolundadata.se

www.frolundadata.se

010-405 68 55