

LITTLEmack Communicator

Artikelnummer: 233300474

LITTLEmack Communicator är en samtalsapparat för inspelning och uppspelning av en fras.



Hur man spelar in och upp meddelanden

För att spela in ett meddelande måste man först vara i *inspelningsläge*. För att komma hit håller man nere RECORD-knappen till dess att RECORD-lampan tänds. Sedan släpper man knappen. När man befinner sig i inspelningsläge kan man spela in ett meddelande genom att trycka och hålla ner kontaktytan och sedan prata in ett meddelande. Släpp knappen när du pratat färdigt. Observera att RECORD-lampan blinkar medan inspelning pågår. LITTLEmack har en inspelningstid på 2 minuter. När 10 sek inspelningstid återstår blinkar lampan gult. För att komma ur inspelningsläget trycker man ner RECORD-knappen.

För att spela upp ett inspelat meddelande trycker man på kontaktytan. Man kan också ansluta en kontakt eller leksak till LITTLEmack. Då aktiveras den genom att man trycker på kontakten istället.

Utbytbara lock i olika färger

LITTLEmack har utbytbara lock i fyra olika färger: röd, grön, blå och gul. För att ta av ett lock skruvar man av det moturs. För att sätta på ett lock skruvar man det medurs, till dess att det tar stopp.

Transparent lock

Till LITTLEmack medföljer även ett transparent lock. Med hjälp av detta kan man sätta fast en bild eller symbol på LITTLEmack, som sedan hålls på plats genom att man ”snäpper fast” det transparenta locket ovanpå.

Batteri

LITTLEmack drivs av ett 9-voltsbatteri (9V-6LR61), ett nytt batteri medföljer vid leverans. Batteriluckan finner du på undersidan av din LITTLEmack. För att slå på apparaten, vrid den kombinerade på/av- och volymkontrollen som finns på baksidan av LITTLEmack.

Din återförsäljare:

Frölunda Data AB

Tel: 031-769 55 60

Hemsida: www.frolundadata.se

E-post: info@frolundadata.se