



# Bruksanvisning

## SuperTalker progressiv samtalsapparat

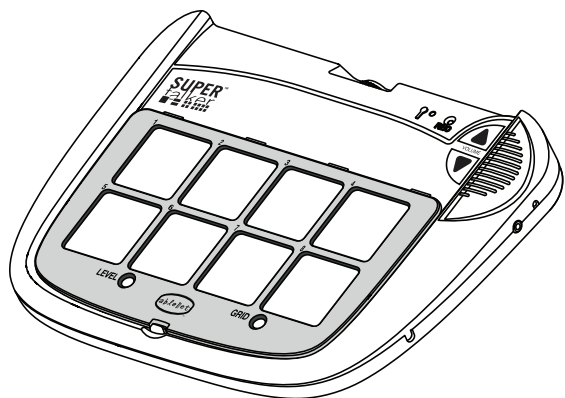


### 1 Starta din SuperTalker

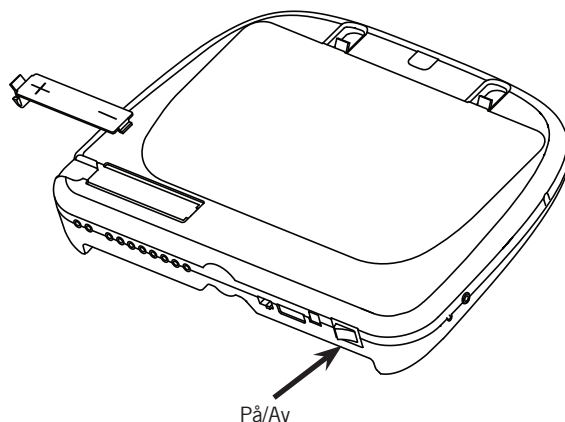

På/Av

Sätt in 4 AA-batterier i den riktning bilden visar.  
På/Av-knappen sitter på enhetens "rygg" (se ovan).

### 2 Välj antal bildrutor och nivå

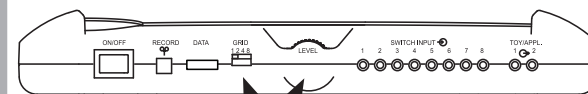


Justera efter behov

När du har valt raster och bildöverlägg väljer du nivå med **LEVEL (1-8)** och antal rutor med **Grid (1, 2, 4, 8)** genom reglagen på enhetens rygg.

*OBS! Se alltid till att dina val av nivå och antal rutor motsvarar det rutnät du använder.*

### 3 Aktivera inspelningsläget

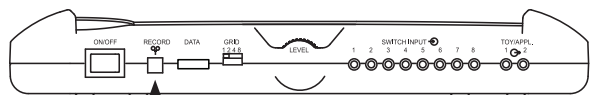


Tryck och håll inne, därefter släpp igen.

Håll knappen **RECORD** intryckt till dess att inspelningslampan (**RECORD Light**) tänds och släpp sedan knappen igen.

### 4 Spela in ett nytt meddelande

Håll intryckt medan du talar

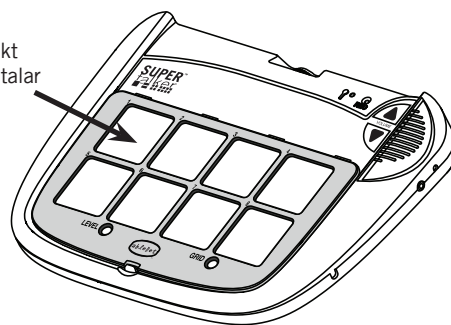


Håll valfri ruta intryckt. Börja spela in meddelandet när du hör ett pip och släpp rutan när du är klar.

Inspelningslampan lyser när du spelar in

*OBS! Tala nära mikrofonen för att skapa tydliga meddelanden!*

### 5 Lämna inspelningsläget

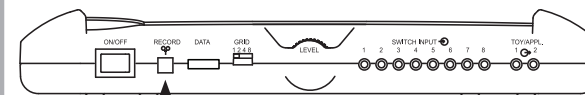


Tryck och släpp igen

Tryck en gång på knappen **RECORD** för att lämna inspelningsläget.

*OBS! Du kan spela in upp till 16 minuter av meddelanden. När endast 2 minuters inspelningstid återstår kommer inspelningslampan att börja lysa med ett gult sken.*

## Avancerade funktioner

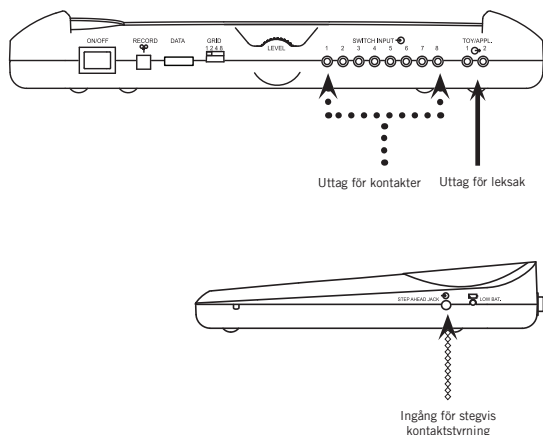

### Spela upp meddelanden med switchar/kontakter

Anslut valfri switch (3,5 mm) i motsvarande rutas uttag (se bilden). Uttag 1 aktiverar ruta 1, o.s.v. Uttagen visas på bilden av den punktbaserade pilen. Över varje uttag visas den ruta uttaget svarar mot, i ordningsföljd från vänster.

### Använd kontaktstyrda leksaker med SuperTalker

Anslut kontaktstyrda leksaker (3,5mm audioplug) i något av de två uttagen (TOY/APPL) som är markerade en en streckad pil på bilden. Leksaken aktiveras när du trycker på en ruta och stängs av igen när SuperTalker har spelat färdigt meddelandet.

**OBS!** Uttagen för leksaker (TOY/APPL) är mappade till de första 2 rutorna på SuperTalker. För att använda en apparat med vanligt elsladd (220V) krävs en reläbox, t.ex. PowerLink 4.

### Stegvis kontaktstyrning

Anslut valfri switch till uttaget som är märkt "Step Ahead jack" för att kunna spela upp meddelanden i ordningsföljd, från 1 - 8.

**OBS!** Stegvis kontaktstyrning gör att du med 1 switch kan aktivera flera meddelanden, genom att klicka en gång till aktiveras nästa ruta.

## Rutnät och överlägg



### Om rutnäten

SuperTalker levereras med rutnät för 1, 2, 4 och 8 rutor. För att byta rutnät trycker du på den lilla knappen "Pull" (under AbleNet-loggan). Glöm inte välja rätt läge med switchen "Grid" på enhetens rygg.

### Förvaringsfack för överlägg

Förvaringsfacket på baksidan har plats för upp till 3 överlägg. Du kan även förvara vanliga pappersöverlägg här.

### Mallar för överlägg

Tomma mallar för överlägg finns att ladda ner som PDF: <http://www.frolundadata.se/butik/supertalker>

## Användbara tips

### Att tänka på vid inspelning

Om du inte använder SuperTalker på 20 sekunder i inspelningsläget, kommer den automatiskt lämna läget igen.

Radera allt - om du håller ERASE intryckt i 10 sekunder kommer alla meddelanden på enheten att raderas.

### Att tänka på vid uppspelning

Om rutnätet som används inte matchar det antal rutor som enheten är inställd på, kommer fel meddelande spelas upp.

Om du trycker på en ruta där det inte redan finns ett meddelande kommer en gul lampa att lysa.

### Volymlås



Lås volymknapparna genom att hålla rutorna längst ner till vänster och höger intryckta samtidigt. När du använder volymknapparna signaleras läget av lampan:

RECORD lyser gult - Volymknapparna är olåsta  
RECORD lyser rött - Volymlås eller max/min-volym

### Monteringsmöjligheter

Det finns ett särskilt monteringsfäste för SuperTalker, som går att köpa som tillbehör.

## Produktöversikt

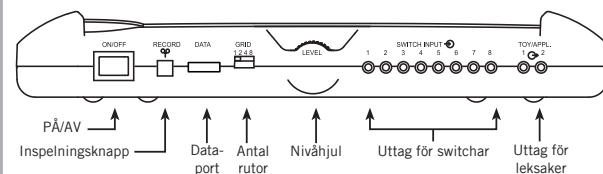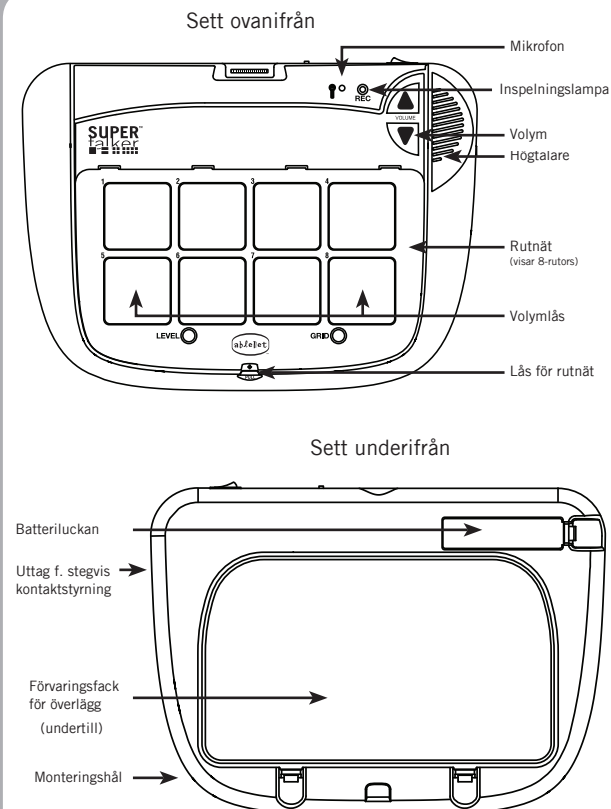

### Fabriksgaranti

AbleNet ger 2 års fabriksgaranti. Täcker ej handhavandefel. För mer information om garantivillkor, se [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

För mer information om AbleNets produkter, kontakta din svenska återförsäljare:

### Frolunda Data Försäljnings AB

Tel: 031 - 769 55 60  
[info@frolundadata.se](mailto:info@frolundadata.se)  
[www.frolundadata.se](http://www.frolundadata.se)