


# MEMO Dayboard

Art.nr: 508820 och 508825

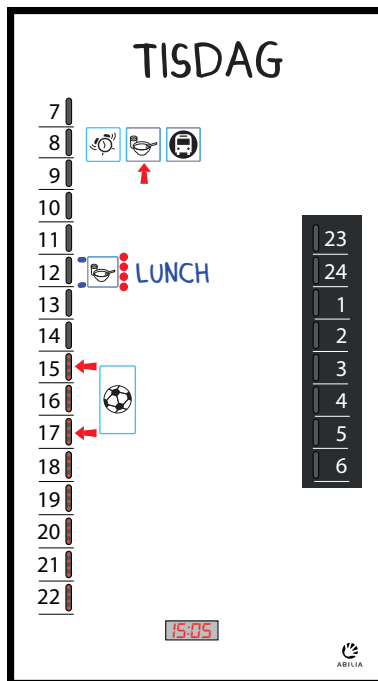



# Innehållsförteckning


<b>Inledning</b> .....	<b>5</b>
Produktbeskrivning .....	5
Avsedd användning .....	5
Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter .....	5
Dokumentbeskrivning .....	5
Produktöversikt .....	6
<b>Säkerhet</b> .....	<b>7</b>
Säkerhetsdefinitioner .....	7
Säkerhetsinstruktioner för användning .....	7
Allvarliga incidenter .....	7
Produktansvar .....	8
<b>Förberedelser</b> .....	<b>9</b>
Montera MEMO Dayboard på en vägg .....	9
Starta upp MEMO Dayboard .....	10
Sätt datum och tid .....	10
Anpassa MEMO Dayboard .....	10
<b>Användning</b> .....	<b>11</b>
Visa datum, veckodag och månad .....	12
Visa händelser och aktiviteter .....	12
Ställ in larm .....	14
Ställ in låsläge .....	17
Ändra inställningar för ljusstyrka .....	17
Ändra allmänna inställningar .....	18
Ändra starttid för dag och natt .....	19
Dölj delar av tavlan .....	19
Använd som 12- timmarsversion .....	19
<b>Skötsel</b> .....	<b>20</b>
Rengör MEMO Dayboard .....	20
Återställ till fabriksinställningar .....	20
<b>Felsökning</b> .....	<b>21</b>
<b>Förvaring och kassering</b> .....	<b>22</b>
Förvaring .....	22

Kassering .....	22
<b>Tekniska data .....</b>	<b>22</b>
MEMO Dayboard .....	22
Tillbehör .....	22


# Inledning

## Produktbeskrivning

MEMO Dayboard är en planeringstavla för personer som behöver en visuell översikt över dagen. Den har en magnetisk whiteboard och två tidpelare: en med röda ljuspunkter för dagen och en med blåa ljuspunkter för natten. De olika färgerna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Genom att visualisera händelser och aktiviteter med text och bilder får man en översikt över dagen. Tavlan kan även ställas in att larma vid önskade tidpunkter.

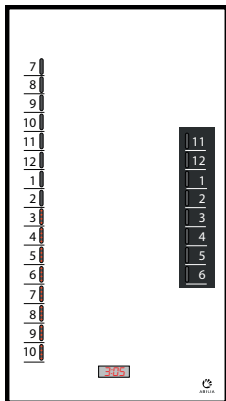

MEMO Dayboard 12-timmarsversion

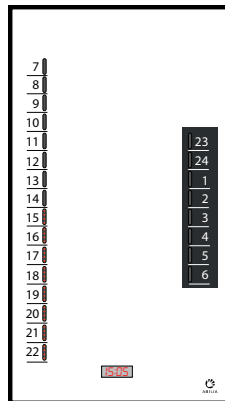

MEMO Dayboard 24-timmarsversion

Det finns olika tillbehör för MEMO Dayboard, till exempel *Bordstativ*, *Låsbar dörr* och *Anpassningsmaterial* med magneter. Se *Tillbehör* på sidan 22.

## Avsedd användning

MEMO Dayboard är en planeringstavla som är avsedd för personer som behöver en visuell översikt över dagen i relation till tidens gång. MEMO Dayboard är lämplig för barn, vuxna och äldre med begränsad förmåga att hantera tid. Till exempel personer med ADHD/ADD, autism, tidig demens och mild eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

MEMO Dayboard är avsedd för inomhusbruk hemma, i skolan eller på arbetet.


## Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter

MEMO Dayboard marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter.

## Dokumentbeskrivning

Den här bruksanvisningen är avsedd för stödpersoner. I det här dokumentet lär du dig att använda och anpassa MEMO Dayboard, så att det passar användaren bäst.

## Produktöversikt

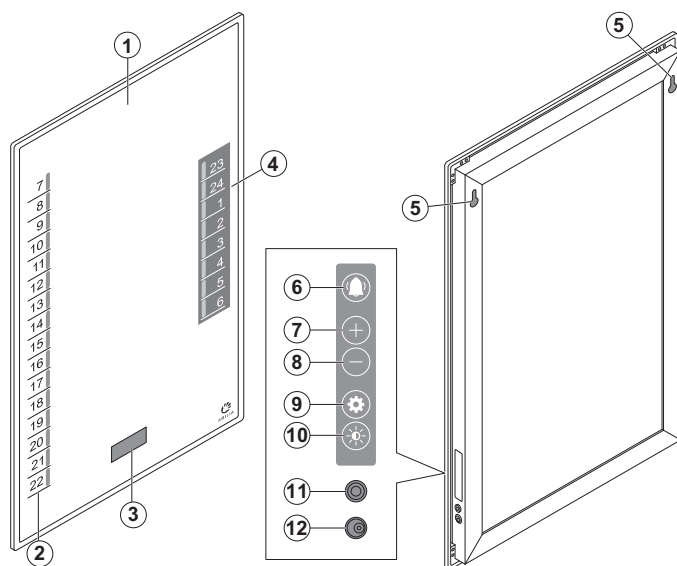

1. Magnetisk whiteboard
2. Tidpelare Dag
3. Digital klocka
4. Tidpelare Natt
5. Hål för upphängning

### *Sidopanel:*

6. Knapp för inställning av larm
7. + knapp
8. - knapp
9. Knapp för allmänna inställningar
10. Knapp för inställning av ljusstyrka
11. Uttag för anslutning av manöverkontakt
12. Uttag för anslutning av nätadapter

### **Medföljande delar**

- MEMO Dayboard
- Nätadapter
- 3 Whiteboardpennor
- Mikrofiberduk
- Monteringsmall
- Skruvar och väggpluggar

### **Medföljande dokument**

- Bruksanvisning (det här dokumentet)
- Lathund

---

## Säkerhet

### Säkerhetsdefinitioner



**VARNING:** Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.



**FÖRSIKTIGHET:** Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.

**OBS:** Information som är nödvändig i en viss situation.

**TIPS:** Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.

### Säkerhetsinstruktioner för användning



**VARNING:** Läs följande varningsinstruktionerna innan du använder produkten.

- Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen.
- Använd inte MEMO Dayboard som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter.
- Använd endast CE-märkta manöverkontakter.
- Använd endast den ursprungliga nätadaptern som levereras med MEMO Dayboard.
- Använd inte vassa föremål på whiteboardtavlan eller på sidopanelens knappar.
- Montera MEMO Dayboard korrekt. Felaktig montering kan orsaka personskador eller skador på enheten.
- Tillbehöret *Anpassingsmaterial* innehåller smådelar som inte är lämpliga för barn under 3 år, på grund av kvävningrisk. Vid behov, använd tillbehöret *Låsbar dörr* för att hålla delarna åtskilda från användaren.

### Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet.

En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till någon av följande situationer:

- En patient, användares eller annan persons dödsfall.
- Tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd.
- Ett allvarligt hot mot folkhälsan.

## Produktansvar

Abilia AB har analyserat de risker som förknippas med produkten i enlighet med EN ISO 14971. Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen.

Beakta alltid säkerheten vid första och efterföljande användning av produkten. Alla felaktiga sätt använda produkten kan inte återges i detta dokument. Om du är osäker på om du har ställt in eller börjat använda produkten korrekt rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare.

Abilia AB ansvarar inte för förlust, skada, eller påföljande förlust på grund av felaktig användning, bristande uppföljning, felaktig installation, felaktig anslutning och liknande. Det ekonomiska ansvaret för Abilia AB är alltid begränsat till värdet av själva produkten.


Försök att få åtkomst till eller på något sätt manipulera de elektroniska komponenterna i produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvar.




## Förberedelser

### Montera MEMO Dayboard på en vägg


Innan du monterar MEMO Dayboard på en vägg, se till att du har följande verktyg och medföljande delar till hands:

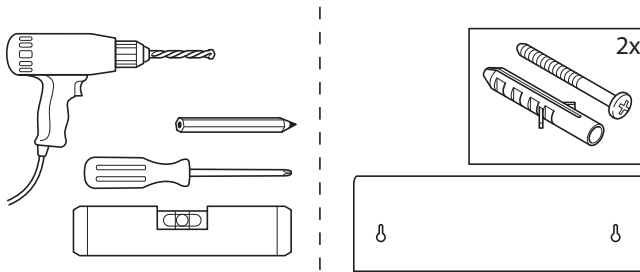


**VARNING:** Montera MEMO Dayboard korrekt. Felaktig montering kan orsaka personskador eller skador på enheten.

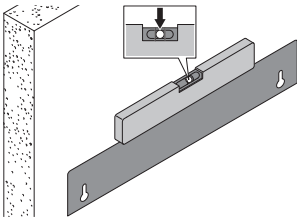


1. Sätt monteringsmallen vågrätt mot väggen.

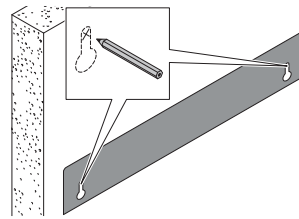


2. Markera borrhålen.

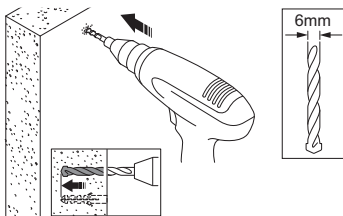

3. Borra hålen.

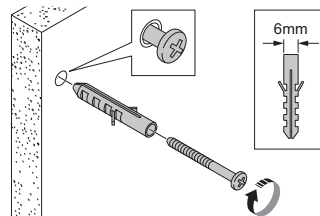

4. Sätt i väggpluggar och skruvar.

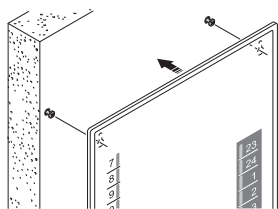



5. Häng MEMO Dayboard på sina monteringshål på väggen.

**TIPS!** Du kan också använda tillbehöret *Bordsstativ* om du inte vill hänga MEMO Dayboard på väggen, se *Tillbehör* på sidan 22.

## Starta upp MEMO Dayboard



**VARNING:** Använd endast den ursprungliga nätadaptern som levereras med MEMO Dayboard.

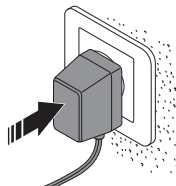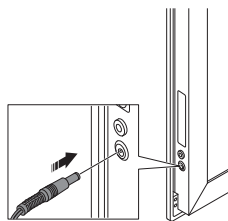

1. Anslut kontakten till MEMO Dayboard.

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

## Sätt datum och tid

Se till att datum- och tidsinställningarna är korrekta. Se *Ändra allmänna inställningar* på sidan 18.

## Anpassa MEMO Dayboard

För att få mest nytta av MEMO Dayboard rekommenderar vi att du anpassar inställningarna efter användarens behov, se *Användning* på sidan 11.

## Användning

Några av följande instruktioner använder sig av tillbehör för MEMO Dayboard. För tillgängliga tillbehör, se *Tillbehör* på sidan 22.



**VARNING:** Tillbehöret *Anpassingsmaterial* innehåller smådelar som inte är lämpliga för barn under 3 år, på grund av kvävningrisk. Vid behov, använd tillbehöret *Låsbar dörr* för att hålla delarna åtskilda från användaren.



**VARNING:** Använd inte vassa föremål på whiteboardtavlan eller på sidopanelens knappar.

Uppdatera planeringstavlan varje dag:

- Visa datum, veckodag och månad, se sidan 12.
- Visa händelser och aktiviteter, se sidan 12.
- Se till att alla önskade larm är korrekt inställda, se *Ställ in larm* på sidan 14.
- Om det behövs, ställ MEMO Dayboard i låsläge, se *Ställ in låsläge* på sidan 17.

Gör följande anpassningar vid behov:

- Ändra inställningar för ljusstyrka, se sidan 17.
- Ändra datum, tid, larmljus, larmljud och andra allmänna inställningar, se *Ändra allmänna inställningar* på sidan 18.
- Ändra starttid för dag och natt, se sidan 19.
- Dölj delar av tavlan som inte behövs, se *Dölj delar av tavlan* på sidan 19.
- Använd som 12-timmarsversion, se sidan 19.

## Visa datum, veckodag och månad

Olika material och tillbehör kan användas för att visualisera datum, veckodag och månad:

- Använd veckodagsmagneterna från tillbehöret *Anpassingsmaterial*. Veckodagsfärgerna till höger är en inofficiell standard i Sverige.
- Använd månadssymbolerna från tillbehöret *Anpassingsmaterial* och montera dem på de självhäftande magnethållarna.
- Hitta en månadskalender på internet och skriv ut den i A6-format. Placera månadskalendern i den magnetiska fotofickan från tillbehöret *Anpassingsmaterial*. Använd till exempel en whiteboardpenna för att markera det aktuella datumet eller kryssa över dagar för att räkna ner till en speciell händelse.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

## Visa händelser och aktiviteter

### Förstärka aktiviteter visuellt


- Skriv eller rita med whiteboardpennor i olika färger.
- Illustrera med bilder.  
Handi-bilder kan skrivas ut från [www.handi.se/print](http://www.handi.se/print). Fäst de utskrivna bilderna på de självhäftande magnethållare från tillbehöret *Anpassingsmaterial*.

**TIPS!** Laminera bilderna för att göra dem mer hållbara.

- Konkretisera med föremål.  
Använd kylskåpsmagneter eller fäst föremål på de självhäftande magnethållarna från tillbehöret *Anpassingsmaterial*.


### Använd handlingskedjor

En handlingskedja hjälper till att utföra aktiviteter i en fast ordningsföljd. Skapa en handlingskedja med tillbehöret *Anpassingsmaterial* genom att fästa flera bilder på rad på den självhäftande magnetlisten. När aktiviteten är avslutad, placera en cirkelmagnet över symbolen eller flytta en pilmagnet till nästa steg i handlingskedjan.

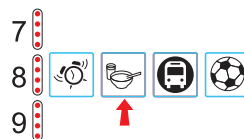


### Knyt ihop aktivitet med aktuell tidpunkt

För att indikera den exakta starttiden för en aktivitet, använd pilmagneter från tillbehöret *Anpassingsmaterial* eller rita en prick eller dra ett streck med whiteboardpennorna.

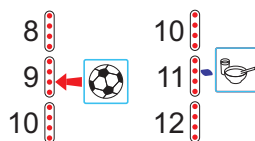

### Konkretisera hur länge aktiviteten pågår

För att konkretisera hur länge en aktivitet pågår kan man visa det med hjälp av cirkelmagneter från tillbehöret *Anpassingsmaterial* eller genom att göra symbolen så lång som sin tidslängd i förhållande till tidpelaren.

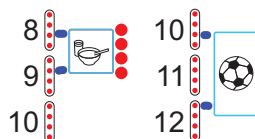

### Konkretisera att dagen fortsätter

För att tydliggöra att dagen fortsätter hemma när man kommer hem, kan man markera på tavlan både när man åker och när man kommer hem.

Till exempel kan man visa att man ska åka till den dagliga verksamheten klockan 10 och komma hem klockan 15.

### Markera att aktiviteten är avslutad

För att tydliggöra att aktiviteten är avslutad kan man ta ned bilden från tavlan. Man kan även sätta larm på aktivitetens sluttid, se *Ställ in ett nytt larm* på sidan 14.

## Ställ in larm




**WARNING:** Använd inte MEMO Dayboard som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter.


**OBS:** Ett larm gäller varje dag tills det raderas, se *Radera ett larm* på sidan 15.

**OBS:** MEMO Dayboard lämnar inställningsläget automatiskt efter 20 sekunder. Alla ändrade inställningar sparas.

### Visa alla aktuella larm

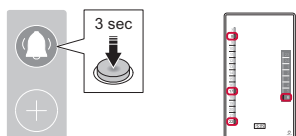


1. Gå in i inställningsläget.  
Alla tidpunkter med larm tänds.

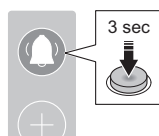


2. Lämna inställningsläget.

### Ställ in ett nytt larm

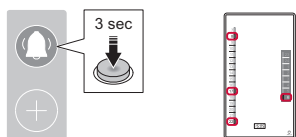


1. Gå in i inställningsläget.  
Alla tidpunkter med larm tänds.

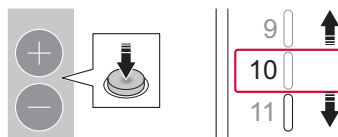


2. Använd + och - knappar för att välja en tidpunkt.

**TIPS!** Håll knappen + eller - nedtryckt för att flytta pekaren snabbare.

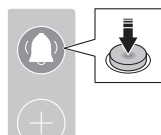


3. Ställ in larmet.  
För att ställa in fler larm, upprepa steg 2 och 3 innan du lämnar inställningsläget.

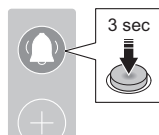

4. Lämna inställningsläget.

## Stäng av ett larm med sidopanelen

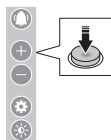

1. Tryck på valfri knapp på sidopanelen. Larmljuset slutar efter en minut. Larmljuset slocknar efter 15 minuter.





## Stäng av ett larm med manöverkontakt



**VARNING:** Använd endast CE-märkta manöverkontakter.

För att göra det enklare att stänga av larmen kan en manöverkontakt användas. Det finns många manöverkontakter tillgängliga. Kontakta oss för råd, se *Kontaktinformation* på näst sista sidan.



## Radera ett larm

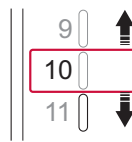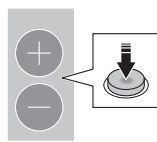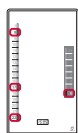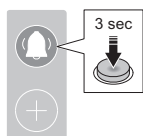

1. Gå in i inställningsläget. Alla tidpunkter med larm tänds.

2. Använd + och – knappar för att välja en tidpunkt med larm.


**TIPS!** Håll knappen + eller - nedtryckt för att flytta pekaren snabbare.

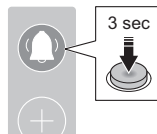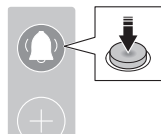


3. Radera larmet. För att radera fler larm, upprepa steg 2 och 3 innan du lämnar inställningsläget.

4. Lämna inställningsläget.


## Radera alla larm

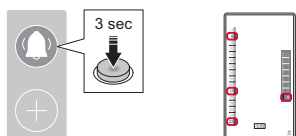

1. Gå in i inställningsläget.  
Alla tidpunkter med larm tänds.

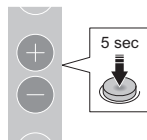

2. Tryck och håll i + och – knapparna samtidigt i 5 sekunder för att radera alla larm.

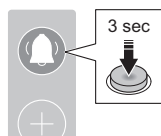

3. Lämna inställningsläget.

## Ställ in larminställningar

För att aktivera eller inaktivera alla larm eller ändra ljud- eller ljusinställningar för alla larm, se *Ändra allmänna inställningar* på sidan 18.

Möjliga larminställningar är

- Hur larmljuset ska fungera: av, blinka med ljuspunkt, blinka med ljuspelare.
- Om larmen ska vara aktiverade eller inaktiverade. Att inaktivera larmen kan vara lämpligt att göra på helgerna, om larmen endast gäller för vardagar.

### EXEMPEL: Hur flyttar man ett larm



- Tryck och håll in knappen för inställning av larm i 3 sekunder för att gå in i inställningsläget.
- Använd + och – knapparna för att välja tidpunkten för larmet som ska flyttas.
- Tryck på knappen för inställning av larm för att radera larmet.
- Använd + och – knapparna för att välja tidpunkten av det nya larmet.
- Tryck på knappen för inställning av larm för att ställa in larmet.
- Tryck och håll in knappen för inställning av larm i 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

**Resultat:** Det gamla larmet har raderats och det nya larmet är inställt!



## Ställ in låsläge

Det är möjligt att låsa knapparna på sidopanelen så att inga inställningar kan ändras.

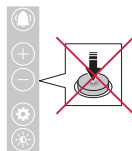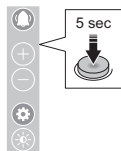

1. För att aktivera eller inaktivera låsläget, tryck och håll in de två knapparna för inställning av larm och för allmänna inställningar tills ett pip hörs.



2. När MEMO Dayboard är i låsläge är alla knapparna inaktiverade. Det är fortfarande möjligt att stänga av ett pågående larm. När låsläget är aktivt och man trycker på valfri knapp visas "LOC" kort på displayen.

## Ändra inställningar för ljusstyrka

**OBS:** MEMO Dayboard lämnar inställningsläget automatiskt efter 20 sekunder. Alla ändrade inställningar sparas.



Ändra ljusstyrkan på:

1. Tidpelare Dag
2. Tidpelare Natt
3. Klocka

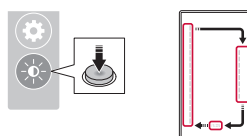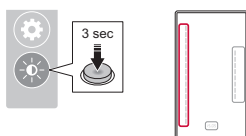

1. Gå in i inställningsläget.

2. Använd knappen för inställningarna av ljusstyrka för att välja Tidpelare Dag, Tidpelare Natt eller Digital Klocka.

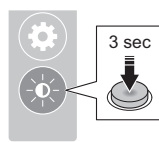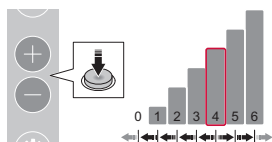


3. Använd + och - knappar för att ändra ljusstyrkan.

För att ställa in fler inställningar på en gång, upprepa steg 2 och 3 innan du lämnar inställningsläget.

4. Lämna inställningsläget.

## Ändra allmänna inställningar

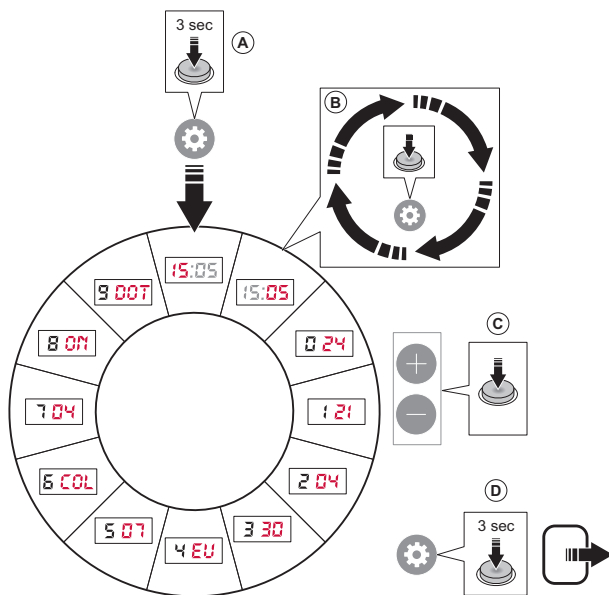

### Steg

- Gå in i inställningsläget.
- Stega till önskad inställning.
- Ändra inställningsvärdet.
- Spara och lämna inställningsläget.

### Inställningar


Standardvärdet för varje inställning visas i röd text i illustrationen.

- |    |                          |    |   |
|----|--------------------------|----|---|
|    | Timmar                   |    |   |
|    | Minuter                  |    |   |
| 0. | 12 eller 24-timmarläge   | 5. | Starttid för tidpelaren   |
| 1. | År, sista två siffrorna  |    | Om annat än 07 måste även siffrorna för tidpelaren ändras, se <i>Ändra starttid för dag och natt</i> på sidan 19. |
| 2. | Månad                    | 6. | Tidpelarvisning   |
| 3. | Dag                      |    | COL: Som ljuspelare   |
| 4. | Sommartid                |    | DOT: Som ljuspunkt  |
|    | EU: Europeisk sommartid  | 7. | Larmvolym   |
|    | US: Amerikansk sommartid |    | 0: Inget ljud   |
|    | OFF: Ingen sommartid     |    | 6: Maximal volym  |
|    |                          | 8. | Aktivera eller inaktivera alla larm   |
|    |                          |    | ON: Alla larm är aktiverade   |
|    |                          |    | OFF: Alla larm är inaktiverade  |
|    |                          | 9. | Ljuseffekt för larm   |
|    |                          |    | OFF: Inget larmljus   |
|    |                          |    | DOT: Blinkade ljuspunkt   |
|    |                          |    | TOG: Blinkade tidpelare   |

## Ändra starttid för dag och natt

MEMO Dayboard har fasta tider för dag (07:00 till 22:59) och natt (23:00 till 06:59). Om man vill att dagen ska börja en annan tid, till exempel kl. 08.00, kan detta åstadkommas med hjälp av tillbehöret Magnetband, se *Tillbehör* på sidan 22.

Klipp till magnetbandet och ändra tidpelarens starttid, se *Ändra allmänna inställningar* på sidan 18. Man behöver inte justera digitala klockan.

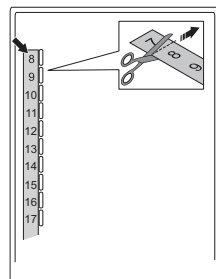


## Dölj delar av tavlan

### Dölj delar av tidpelaren

Om man endast vill visa tidpelaren för den delen av dagen som verksamheten pågår, kan tillbehöret *Magnetband utan text* användas, se *Tillbehör* på sidan 22. Det kan gälla till exempel en skola där man slutar klockan 15 eller fritids som stänger klockan 17.

För att täcka över hela nattpelaren kan man använda bred vit tejp.

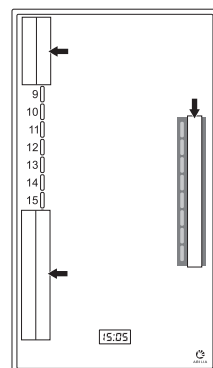

### Dölj siffror bredvid tidpelaren


För personer som inte förstår tiden kan siffrorna på MEMO Dayboard vara förvirrande och ta fokus från tidpelaren och dagens händelser. I så fall kan man täcka över siffrorna med magnetband utan text, se *Tillbehör* på sidan 22.

## Använd som 12-timmarsversion

Det är möjligt att göra om MEMO Dayboard 24-timmarsversion till 12-timmarsversion genom att använda tillbehöret *Magnetband med 12-timmarsvisning*, se *Tillbehör* på sidan 22.

Det kan då även vara lämpligt att ställa in den digitala klockan till 12-timmarsläge, se *Ändra allmänna inställningar* på sidan 18.

På motsvarande sätt kan MEMO Dayboard 12-timmarsversion göras om till 24-timmarsversion.

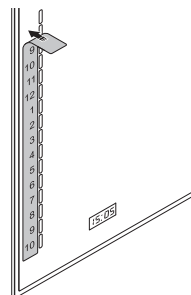

## Skötsel


### Rengör MEMO Dayboard

Rengör MEMO Dayboard genom att fukta whiteboardytan med lite vatten och sedan torka av med den medföljande mikrofiberduken.


**TIPS!** Använd en whiteboardpenna för att skriva över det som är svårt att få bort. Vänta en minut innan ytan torkas av.

### Återställ till fabriksinställningar

Det kan vara lämpligt att återställa MEMO Dayboard om den ska förberedas för en ny användare eller vid felsökning. Återställning till fabriksinställningar raderar alla larm och sätter alla inställningar till standardvärden.

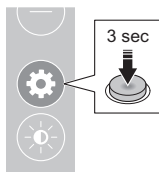

1. Gå in i inställningsläget.

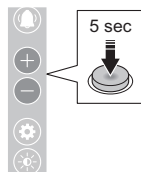

2. Tryck och håll in + och – knapparna för att återställa enheten till fabriksinställningar.

## Felsökning

Om du har frågor angående funktionerna eller inställningarna i produkten, tala med din produktleverantör eller återförsäljare.

Problem	Orsak	Lösning
Vissa knappar på sidopanelen fungerar inte	Produkten är i låsläge	Se instruktionerna i <i>Ställ in låsläge</i> på sidan 17.
	Produkten är defekt	Kontakta support <sup>1</sup> .
Ett inställt larm larmar inte	Produkten är inte ansluten till eluttaget	Se 2
	Larm är inaktiverade	Se instruktionerna i <i>Aktivera eller inaktivera alla larm</i> i <i>Ändra allmänna inställningar</i> på sidan 18.
	Larmljud och larmljus är avstängt	Se instruktionerna i <i>Larmvolym</i> och <i>Ljuseffekt för larm</i> på sidan 18.
	Produkten är defekt	Kontakta support <sup>1</sup> .
Den digitala klockan syns inte	Produkten är inte ansluten till eluttaget	Se 2.
	Klockans ljusstyrka är av	Se 3
	Produkten är defekt	Kontakta support <sup>1</sup> .
En eller båda tidpelarna syns inte	Produkten är inte ansluten till eluttaget	Se 2.
	Tidpelarens ljusstyrka är av	Se 3.
	Produkten är defekt	Kontakta support <sup>1</sup> .
Tavlan blir inte ren	Plastfilmen är utsliten	Kontakta support <sup>1</sup> .
Produkten fungerar inte korrekt	Produkten är defekt	Kontakta support <sup>1</sup> . Supportpersonalen kan be dig återställa produkten till fabriksinställningarna. Se instruktionerna i <i>Återställ till fabriksinställningar</i> på sidan 20.

<sup>1</sup> Se *Kontaktinformation* på näst sista sidan.

<sup>2</sup> Se instruktionerna i *Starta upp MEMO Dayboard* på sidan 10.

<sup>3</sup> Se instruktionerna i *Ändra inställningar för ljusstyrka* på sidan 17.

## Förvaring och kassering

### Förvaring

Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.

### Kassering



Produkten innehåller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

## Tekniska data

### MEMO Dayboard

Mått, H x B x D	713 x 392 x 32 mm
Vikt	3.8 kg
Strömförsörjning	9V DC, 1.1A
Uttag för anslutning av manöverkontakt	3.5mm

### Tillbehör

MEMO Dayboard har följande tillbehör:

- 508785 Anpassingsmaterial
- 508786 Rekonditioneringskit
- 508787 Magnetband utan text
- 508788 Magnetband med 24-timmarsvisning
- 508789 Magnetband med 12-timmarsvisning
- 508790 Magnetband med klocksymboler
- 508792 Veckodagsmagneter SE
- 508794 Bordstativ
- 508795 Pennhållare
- 508796 Låsbar dörr
- 508798 Självhäftande magnethållare, 25 styck
- 508821 Nätadapter MEMO Dayboard



För mer information om MEMO Dayboard och tillbehör, gå till [www.abilia.com/sv/our-products/memo-dayboard-24h](http://www.abilia.com/sv/our-products/memo-dayboard-24h) eller skanna QR-koden.

## Kontaktinformation

### Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige  
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

### Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge  
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

### Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckinghamway Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien  
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

### Internationell

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)



# ABILIA

Kontaktinformation:

CE



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige  
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | [info@abilia.com](mailto:info@abilia.com) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)