

Rekonderingsanvisningar Hiru

1. Testa Hiru för att se till att den fungerar bra (du kan koppla in Hiru, se till att lysdioderna tänds och öppna EasyClick för att kontrollera att ögonen detekteras korrekt med avataren och videoflödet under "kalibrering" och utför en kalibrering. Klicka på några objekt med ögonen för att säkerställa att det fungerar korrekt.)

2. Uppdatera Hiru med hjälp av systray, se *Användarmanual Hiru*.

För att rengöra Hiru:

Använd en desinfektionsservett för att rengöra enheten.

Återställa Hiru:

Hiru har on-chip-teknologi, så sparar den senaste kalibreringen som utfördes på den. För att åsidosätta denna kalibrering är det enda som behöver göras en annan kalibrering. Eftersom vi rekommenderar att det första steget för alla användare när man börjar med en ny eyetracker är att göra en kalibrering, behöver ingenting göras för att återställa den tidigare kalibreringen från den senaste användaren, vilket kommer att hända när en ny kalibrering görs.

Återställa EasyClick:

Om du använder programvaran Easyclick, är det möjligt att spara profiler. Du kan ta bort tidigare profiler manuellt från programvaran (inställningar>profil>ta bort användare), eller återställa Easyclick genom att avinstallera och installera om programmet.

För support, kontakta oss direkt på support@frolundadata.se eller ring oss på 010-405 68 58.

