


iTalk2™ Kommunikationshjälpmedel


Manual

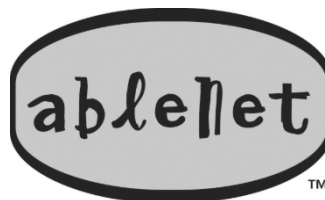

AbleNet, Inc.
Minneapolis/St. Paul, MN 55113
800-322-0956

www.ablenetinc.com

iTalk2™ Kommunikationshjälpmedel

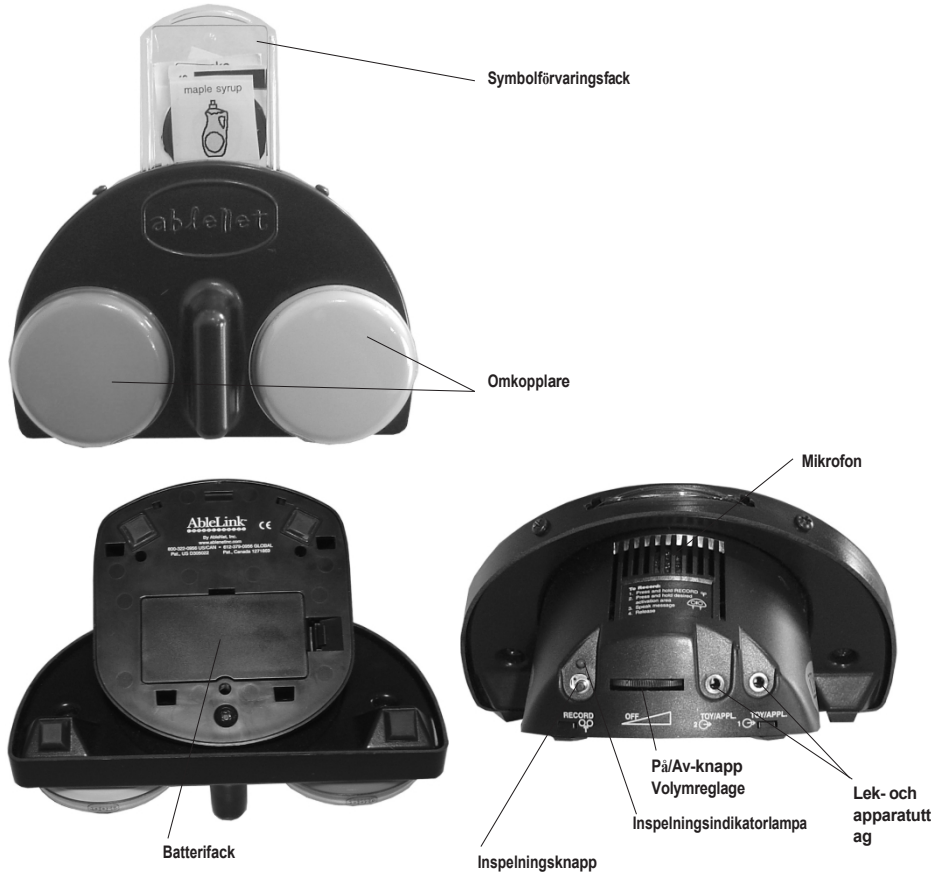

① Kom igång



A. Sätt i batteriet

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i ett 9-volts alkaliskt batteri (ingår ej).
3. Stäng facket.




B. Slå PÅ iTalk2™ och justera volymen

1. Vrid volymknappen till höger för att slå på/stänga av för att sätta på iTalk2™.
2. Justera volymen genom att vrida på volymknappen för på/av.



② Spela in meddelanden

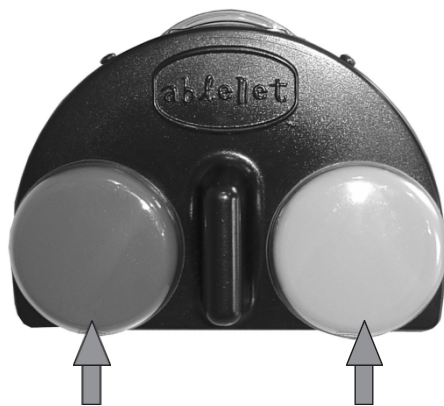


Tryck och håll ned här
för att spela in
meddelande 1.


Tryck och håll ned här
för att spela in
meddelande 2.

A. Spela in meddelanden

1. Slå på iTalk2.
2. Håll in både inspelningsknappen och den övre knappen 1 samtidigt (lampan börjar blinka).
3. Spela in meddelandet.
(Exempel på meddelande: "Visste du att Mount Rainier ligger nära Seattle i Washington?")
4. Släpp både knappen Switch Top och inspelningsknappen.
5. Upprepa för knapp 2.

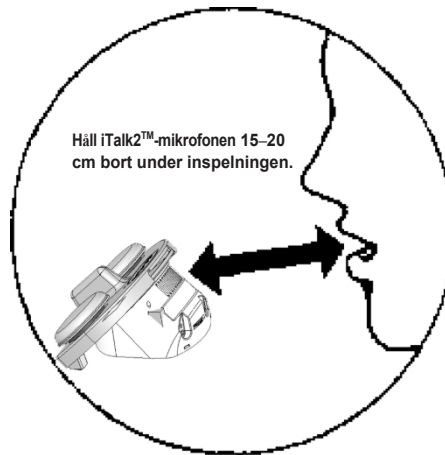


③ Spela upp meddelanden

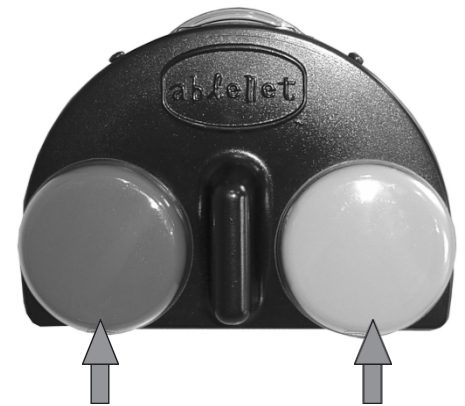

Tryck här
för att spela upp
meddelande 1.

Tryck här
för att spela upp
meddelande 2.

④ Användning och förvaring av symboler

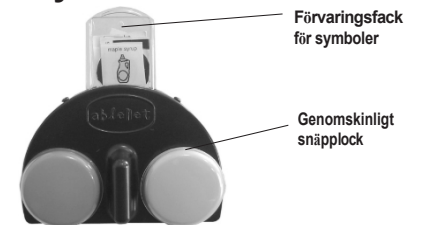


1. Dra av det genomskinliga snäpplocket från aktiveringsområdet.
2. Placera symbolen på brytarens ovansida och sätt tillbaka det genomskinliga locket.
3. Dra ut och skjut ut symbolförvaringsfacket för att förvara ytterligare symboler.




5 Använda leksaks-/tillbehörsuttagen



1. Anslut en 3,5 mm-sladd eller -kabel till uttag 1 eller 2 på leksaken/apparaten.
2. Anslut den andra änden av sladden eller kabeln till önskad leksak/enhet.
3. Se till att både din iTalk2™ och leksaken/apparaten är påslagna.
4. Tryck på lämplig knapp för att spela upp det inspelade meddelandet och aktivera leksaken/apparaten.

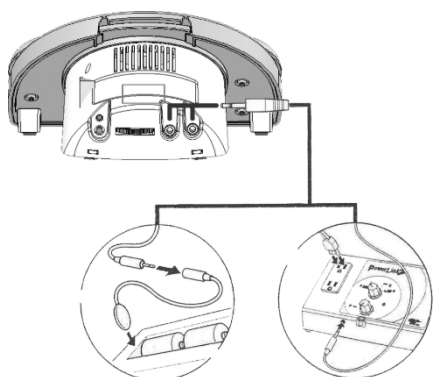


Anslut leksaken/apparaten till rätt uttag och anslut den andra änden av sladden till uttaget på leksaken/apparaten eller till en batteriadapter enligt diagrammet ovan.

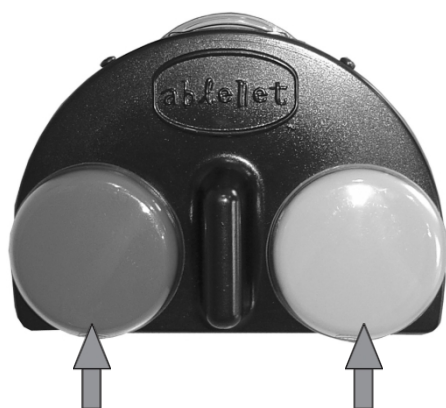

Tryck här för att spela upp meddelande 1 och aktivera leksaks-/apparatkontakt nr 1.


Tryck här för att spela upp meddelande 2 och aktivera leksakens/apparatens uttag nr 2.

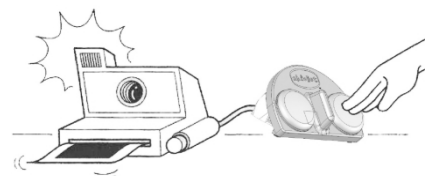

När anslutningen är korrekt utförd trycker du på motsvarande knapp för att aktivera leksaken/apparaten.

6 Montering av iTalk2™

Använd Easy Mounting Base (köps separat) för att montera iTalk2™ på en vertikal yta eller på ett monteringsystem.

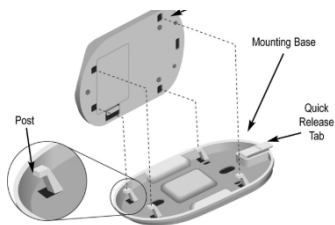

A. Fästa monteringsbasen på iTalk2™

1. Placera de fyra stiftarna på monteringsbasen i motsvarande hål på undersidan av iTalk2™.
2. Skjut basen framåt tills den klickar på plats.

B. Ta bort monteringsbasen från iTalk2™

1. Tryck på snabbkopplingsfliken på monteringsbasen.
2. Skjut basen mot enhetens baksida.




iTalk2-handbok ● Sida 5

Monteringsalternativ


Tillfällig väggmontering

1. Placera monteringsplattan på väggen och markera placeringen av de långa skruvhålen.
2. Borra hål där du har markerat och sätt i skruvarna (skruv med panhuvud nr 8).
3. Skruva fast skruvarna i väggen och låt dem sticka ut 1/8–1/4 tum. Häng upp monteringsbasen på skruvarna genom att använda de långa skruvhålen.
4. Fäst monteringsplattan på iTalk2™.
- 5.

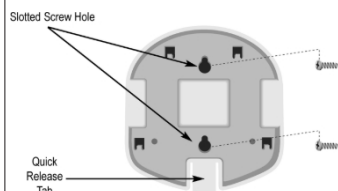


Permanent väggfäste

För permanent montering, skruva fast plattan direkt i väggen med tre #8 skruvar med panhuvud och hålen som anges i ritningen nedan.

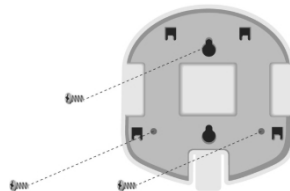

Liten triangulär monteringsplatta

När du använder iTalk2™-monteringsplattan med ett AbleNet-monteringsystem, fäst monteringsbasen på den lilla triangulära plattan med hjälp av skruvarna och vingmuttrarna levereras med den lilla triangulära monteringsplattan. Detta gör att du snabbt kan sätta fast och ta bort din iTalk2™ från ett monteringsystem.

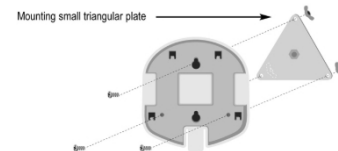

Andra monteringsalternativ (säljs separat)

- UltraStik™ för montering på plana ytor.
- Dual Lock™ för montering på vertikala ytor.
- Resrem för att bära iTalk2™ runt midjan eller över axeln.
- AbleNet-monteringsystem:
 - Universellt monteringsystem med vred
 - Universellt monteringsystem med spak
 - Slim Armstrong® monteringsystem
 - Sensitrac™ platt dyna
 - Sensitrac™ dyna med justerbar arm

Teknisk information

Stickans storlek:	1/8 tum (3,5 mm)
Strömkälla:	9 VDC
Aktiveringsytans diameter: Vikt: Mått:	
	2-1/2 tum
	12,5 oz
	6,5 tum bred, 5,5 tum djup.
Total inspelningstid:	3,5 tum hög
	8,5 sekunder/plats
	17 sekunder totalt
Känslighet för aktiveringsområden:	2-3 oz

Säkerhetstips

- Läs instruktionerna för alla spel, leksaker och apparater innan du använder dem.
- Var försiktig när du placerar en apparat nära en användare, särskilt om apparaten har rörliga delar eller alstrar värme.
- Använd aldrig kommunikationshjälpmedlet iTalk2™ där det kan bli vått.

Skötsel och förvaring

För att rengöra kommunikationshjälpmedlet iTalk2™ ska du koppla bort enheten från all utrustning. Torka av aktiveringsområdet med en fuktig trasa (mild tvål kan användas om så önskas).

**VARNING! SÄNK INTE NER iTalk2™ I VATTEN.
DEMONTERA INTE iTalk2™.**

Felsökningsguide

Problem:

Lösning:

Spelar inte in eller spelar inte upp.

1. Byt ut batteriet.
2. Om ovanstående inte löser problemet, vänligen ring AbleNets tekniska support på (800) 322-0956.

Leksaken/apparaten fungerar inte

1. Se till att leksaken/apparaten du försöker använda är slagen på.
2. Se till att du är ansluten till leksakens/apparatens uttaget som motsvarar den aktiveringsyta du vill använda.
3. Se till att iTalk2™ är slagen på.
4. Se till att du har spelat in ett meddelande.
5. Om ovanstående inte löser problemet, vänligen ring AbleNets tekniska support på (800) 322-0956.

Endast ett aktiveringsområde eller en leksak/enhet fungerar

1. Ring AbleNets tekniska support på (800) 322-0956.

Inspelningen har dålig talkvalitet eller långsamt tal.

1. Byt ut batteriet.
2. Om ovanstående inte löser problemet, vänligen ring AbleNets tekniska support på (800) 322-0956.



AbleNet – Verktyg för självständighet

AbleNet utvecklar och tillverkar hjälpmedel som främjar självständighet. Våra produkter och tjänster gör det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar att delta mer fullt ut i vardagliga aktiviteter hemma, i skolan, på arbetet och i samhället.

AbleNets kompletta sortiment av innovativa produkter hjälper barn och vuxna att kommunicera och styra el- och batteridrivna apparater, leksaker och enheter. AbleNet erbjuder även workshops, skriftligt material och information som stöder och hjälper familjer, lärare, terapeuter och vårdgivare över hela världen.

Våra grundläggande övertygelser

De tre grundläggande övertygelserna att alla kan lära sig, alla kan delta och alla kan kommunicera utgör grunden för AbleNets uppdrag. Dessa grundläggande övertygelser styr utvecklingen av de produkter och tjänster vi skapar för pedagoger världen över som strävar efter att förbättra livskvaliteten för alla personer med betydande funktionsnedsättningar. Delta i vårt uppdrag att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar genom att erbjuda meningsfulla möjligheter för dem att lära sig... delta... och kommunicera.

Garanti

AbleNet erbjuder 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti om våra produkter inte uppfyller dina behov eller förväntningar. Produkterna måste vara i nyskick för att denna tjänst ska gälla. Ring (800) 322-0956 för mer information.

Följ vår policy för reparationer och returer när du skickar tillbaka produkter inom ramen för vår garanti.

Information om reparationer och returer hos AbleNet

Alla kommunikationshjälpmedel tillverkade av AbleNet omfattas av ett års garanti från inköpsdatumet. Om inget inköpsbevis kan uppvisas gäller en garantiperiod på ett år från det tillverkningsdatum som är stämplat på produktens insida.

Alla produkter som omfattas av garantin repareras kostnadsfritt. Produkter som inte längre omfattas av garantin kan repareras mot en symbolisk avgift. Alla reparationer omfattas av 90 dagars garanti. Innan du returnerar en produkt för reparation, vänligen kontakta en kundtjänstrepresentant hos AbleNet för att få ett returingsnummer (RA#) och information om eventuella reparationskostnader.

För att returnera en produkt för återbetalning eller reparation, vänligen ange följande tillsammans med din produkt:

- Namn och telefonnummer
- RA-nummer
- Returadress
- Kort beskrivning av problemet (vad produkten gör eller inte gör samt vilka åtgärder som redan vidtagits för att åtgärda problemet) eller anledning till returen
- Dokumentation som visar inköpsdatum (dvs. kopia av följesedel, inköpsorder eller faktura)
- Check, postanvisning eller inköpsorder på reparationsbeloppet.

Skicka ovanstående till:
AbleNet, Inc.
Att: ditt RA-nummer Minneapolis/St.
Paul, MN 55113 USA

För att kontakta oss:
Avgiftsfritt: (800) 322-0956 (endast USA och Kanada) Fax:
651-294-2259
E-post: customerservice@ablenetinc.com
Webbplats: www.ablenetinc.com

Garanti

AbleNet erbjuder ett års garanti på alla AbleNet-produkter. Produkter från andra tillverkare omfattas av tillverkarens garanti. Garantivillkoren i sin helhet finns tillgängliga på begäran. Ring (800) 322-0956 för mer information.


© 2005 AbleNet, Inc., Alla rättigheter förbehållna
PN900-80080 Rev D (8/05)





Tekniska hjälpmedel, Anpassning och utbildning

www.icap.nu eller
www.frolundadata.se

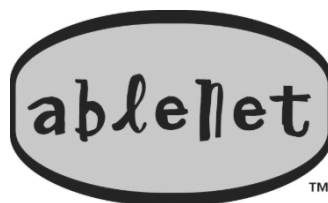

AbleNet, Inc.
Minneapolis/St. Paul, MN 55113
800-322-0956

www.ablenetinc.com