

FlexiBlink AURORA Larmmottagare

Bruksanvisning



Art. Nr. 203471648

AURORA är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem.

FlexiBlink LIFE används för att varna om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvaktare samt dagliga incidenter som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter.


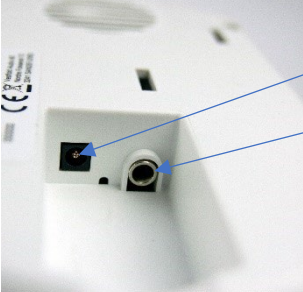
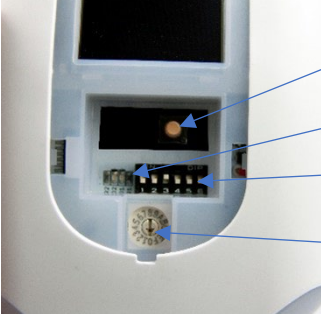
Avisering utlöses när t.ex. ett FlexiBlink LIFE-röklarm upptäcker rök eller en telefonsändare upptäcker att den ringer.

Du kan ha så många aviseringsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och avisering.

Aurora meddelar också när sändare behöver byta batteri.

AURORA har en inbyggd grannvarningsfunktion, som möjliggör brandsäkerhet mellan bostäder. Detta kan ställas in med en IRIS LIFE.

AURORA är monteringsfri - AC-adaptorn sätts in i vägguttaget.

	<p>1. Ljus (topp och botten)</p> <p>2. Skärm</p> <p>3. Volymkontroll</p> <p>4. Uttag för att öppna frontluckan</p> <p>5. Bas</p>
	<p>6. Strömanslutning</p> <p>7. Linjeutgång för ljud</p>
	<p>8. LIFE-knapp</p> <p>9. Ljusindikator</p> <p>10. Funktionsomkopplare</p> <p>11. Lägesomkopplare</p>

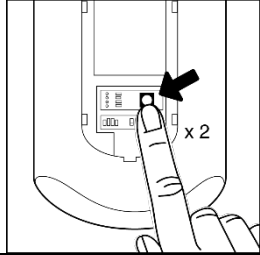
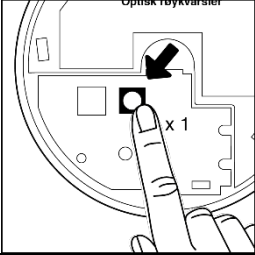
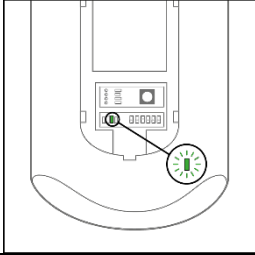
KOM IGÅNG

AURORA kan placeras på ett bord i den medföljande basen, eller fästas på väggen med det medföljande fästet.

TIPS! Montera inte fästet förrän du har kontrollerat att nätsladden är tillräckligt lång.

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget och anslut sladden till AURORA.

SAMMANKOPPLING

		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.</p>	<p>2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen.

Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

AVBRYT SAMMANKOPPLING

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se avsnittet "Utökade funktioner".



Art. Nr. 203471648

DAGLIG ANVÄNDNING

Underrättelse:

Händelser som inträffar i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med ljud, blinkande ljus och bilder.

Justera volymen:

Använd volymkontrollen på höger sida.

VIKTIG! Larm aviseras alltid med full volym.

Meddelanden om batteribyte:

Om en FlexiBlink LIFE-sändare har låg batterinivå, meddela AURORA i god tid innan batteriet är helt tomt. AURORA visar varningssymbolen följt av en bild av ett batteri. Detta växlar fram och tillbaka tills batteriet byts ut och sändaren aktiveras eller testas.

UTÖKADE FUNKTIONER:

AURORA är utrustad med en funktionsomkopplare (10) och en lägesomkopplare (11) bakom frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningarna om du inte behöver funktionerna som förklaras i det här kapitlet.

Välja funktioner (funktionsomkopplare 10):

Dagliga signaler / endast larm - switch 1

Om du vill att AURORA inte ska meddela dig om dagliga händelser, som t.ex dörrklocka och telefon kan du trycka strömbrytare 1 uppåt. AURORA kommer nu endast att meddela larm - förhållanden av säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.).

Grannmeddelande - switch 2

För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för installationen. Då är anmälningsmottagarna inställda på att meddela vid brand eller inbrott hos berörda grannar. Om du inte vill att AURORA ska meddela grannar kan du trycka strömbrytare 2 uppåt. AURORA kopplas då bort från grannanmälan.

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon och dörrklocka.

Volymlåsknapp 5

Switch 5 är för volymlåsning. Genom att trycka omkopplare 5 uppåt låses volymen till den aktuella nivån. Denna inställning hålls kvar även efter ett strömavbrott, och när du försöker justera volymen kommer skärmen att meddelas om att volymen är låst.

Kombinationen av funktioner kan göras fritt efter behov med omkopplare 1 till 3 och 5. Omkopplare 4 och 6 är reserverade för framtida behov.

Välj läge (lägesomkopplare 11):

(F) Installationsläge

Genom att ställa in omkopplaren i läge F sätts AURORA i installationsläge. Detta innebär att det senast mottagna larmet visas i displayen tills ett eventuellt nytt larm inträffar.

Detta är särskilt användbart när du installerar en dörrklocka och intercomsändare. Kom ihåg att ställa tillbaka omkopplaren till 0 när installationen är klar.

(1) Ljuslampa med display

Genom att ställa in omkopplaren i läge 1 ställs AURORA in som en glödlampa. Detta gör att AURORA visar varningssymbolen i displayen och blinkar i lamporna, men ljudet är tyst. Ljud är fortfarande tillgängligt via linjeutgång.

(2) Akustiska larm med display

Genom att ställa in omkopplaren i läge 2 ställs AURORA in som ett akustiskt larm med display. Det betyder att AURORA visar varningssymbolen i displayen och spelar upp varningsljud, men det växlande ljuset i lamporna är släckt.

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö.

Produkten kommer att meddela mottagarna om behovet av batteribyte om du har mottagare som visar detta.

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISK DATA

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm (utan väggfäste och fot.	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 gram (utan väggfäste och fot)	Driftsspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Blir inte ihopkopplad - indikatorlampan lyser rött	Anslutningen misslyckas p.g.a. för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan ihopkopplad med andra enheter.	Återställ ihopkopplingen. Var god försök igen.
	Felaktig ordning i parningen	Tryck på LIFE-knappen två gånger på en enhet i det befintliga systemet och bara en gång på den nya enheten
Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter parning	Har en enhets LIFE-knapp tryckts in två gånger?	Tryck på LIFE-knapparna igen för att avbryta. Försök igen.
	Letar fortfarande efter nya enheter.	Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen.

Efter TEST-tryckning lyser sändaren rött	Enheten är inte parad	Anslut enheten till en mottagare
Efter TEST-tryckning lyser sändaren grönt länge, sedan orange länge	Ingen mottagare är ansluten till sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återanslut. försök igen
Anmälan ej mottagen	Inte ansluten	Koppla bort den senaste enheten och anslut igen
	Brist på täckning	Försök att flytta enheterna närmare varandra eller ställa in en repeater
	Batteri i sändaren är slut	Byt ut batteriet i sändaren
	Avsändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
	Volymen justeras ner	Prova att justera volymen
Avisering mottagen, men inget ljud	Ljudet avstängt	Kontrollera att lägesomkopplaren inte är i läge 1
Avisering tas emot med ljud, men inget tal	Ljus av	Kontrollera att lägesomkopplaren inte är i läge 2.
Avisering mottagen, men inget blinkande ljus	Enheten är felaktigt ansluten.	Återställ ihopparningen på enheten och lägg till igen.
AURORA meddelar händelser, men inga sändare är aktiverade i hemmet.	Grannlarm	Kontrollera att funktionsomkopplaren för grannmeddelanden är korrekt.

