



## AURORA Larmmottagare Produktblad



AURORA är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem.

FlexiBlink LIFE används för att varna om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvaktare samt dagliga incidenter som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter. Avisering utlöses när t.ex. ett FlexiBlink LIFE-röklarm upptäcker rök eller en telefonsändare upptäcker att den ringer.

### Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten.  
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

#### **ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:**

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

#### **SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:**

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen.  
Återställ enheten för att återansluta.

#### **AVBRYT SAMMANKOPPLING:**

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

#### **ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:**

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

### Funktionsbrytare




1	2	3	4	5	6	Beskrivelse
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Standard: Alla aktiva notiser utom röst, sängvibratorkanal A, meny och volym öppen
ON						Endast larm, inte dagliga aviseringar
	ON					Grannvarning inaktiverad
		ON				Röstvarning inaktiverad
			ON			Sängvibrator: Kanal B aktiv
				ON		Meny och volym är låsta



**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr. 203471650

Relaterade produkter:

<u>Brandlarm:</u>			<u>Dør- og porttelefon:</u>		
 Optisk Rökvarnare	 Termisk Brandvarnare	 Brandsändare	 Tryckknapps-sändare	 Dörrklocka sändare	 Dörr- och porttelefon sändare
<u>Telefoni:</u>		<u>Annan larm og kallelse:</u>			
 Mobiltelefon-sändare	 Telefon-sändare	 Ella smycke-sändare	 Armbands-larm sändare och -mottagare	 Barnvakt	 Välfärds-sändare
<u>Vandring och passage:</u>					
 Tidsinställd aktivitetslarm	 Röstlarm	 PIR Gardin sensor	 PIR Mini sensor	 Magnetbrytare	 Sängmatta
<u>Larmmottagare:</u>					
 IRIS	 Junior	 NORA	 Sengevibrator	 Putevibrator	 AURORA

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm (utan väggfäste och fot.)	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 gram (utan väggfäste och fot.)	Driftsspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 42  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50