

Barnvakt Produktblad



FlexiBlink Barnvakt är en praktisk batteridrivna sensor som uppfattar när ett barn gråter och vidarebefordrar aviseringarna till Vestfold Audio-mottagare i hemmet.

Det finns inställningar för ljudnivå och tidsfördröjningar, så att du kan anpassa den till ditt barn.

Barnvakten har en ingång för anslutning av en tryckknapp, rörelsesensor eller en matta som du lägger nedanför exempelvis sängen till ditt barn och som aktiveras när barnet stiger upp.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Funktionsbrytare

















| ID | MEDELANDE | TIDSFÖRDRÖJNING | ID | MEDELANDE | TIDSFÖRDRÖJNING |
|----|---------------|-----------------|----|--------------------|-----------------|
| 0 | Barnet gråter | 0,5 s | 9 | Barn 3 gråter | 2 s |
| 1 | Barn 1 gråter | 0,5 s | A | Barnet gråter | 3 s |
| 2 | Barn 2 gråter | 0,5 s | B | Barn 1 gråter | 3 s |
| 3 | Barn 3 gråter | 0,5 s | C | Barn 2 gråter | 3 s |
| 4 | Barnet gråter | 1 s | D | Begärd assistans | 0,5 s |
| 5 | Barn 1 gråter | 1 s | E | Assistans/Vandring | 0,5 s |
| 6 | Barn 2 gråter | 1 s | F | Assistans/Vandring | 0,5 s |
| 7 | Barnet gråter | 2 s | | | |
| 8 | Barn 2 gråter | 2 s | | | |



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471644

Relaterade produkter:

| <u>Annan larm og kallelse:</u> | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | | |
| Ella smycke-sändare | Armbands-larm sändare och -mottagare | Välfärds-sändare | Tryckknapps-sändare | | |
| <u>Vandring och passage:</u> | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Tidsinställd aktivitetslarm | Röstlarm | PIR Gardin sensor | PIR Mini sensor | Magnetbrytare | Sängmatta |
| <u>Varslingsmottakere:</u> | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| IRIS | Junior | NORA | Sengevibrator | Putevibrator | AURORA |

Tekniska data

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Dim. (bxhxd) | 69x133x27 mm | Temperatur | -10°C +40°C |
| Vikt m/batteri | 140 g | Radiofrekvens | 868.1 – 869.85 MHz |
| Sändarens effekt: | 10 mW e.r.p. | | |