



FlexiBlink - Digital Väckarklocka med Kuddvibrator

Bruksanvisning



KUDDVIBRATOR är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet, och som ansluts direkt till den digitala väckarklockan. Kuddvibratoren meddelar dig om dagliga incidenter och förhållanden av mer säkerhetskaraktär, allt beroende på vilka detektorer/sändare som är installerade och hur sängvibratoren är konfigurerad. För dagliga tillställningar inkluderar vi avisering av dörrklocka och telefon. Trygghetslarm kan vara till exempel spisvakt och brandvarnare.

Kuddvibratoren kan kopplas till digital väckarklocka eller så kan du använda larmfunktionen i IRIS LIFE som fungerar trådlöst. Kuddvibratoren kommer att väcka av att vibrera med samma intensitet som med dagliga signaler. Vibrationen upphör automatiskt efter 2 minuter om väckarklockan inte stängs av.

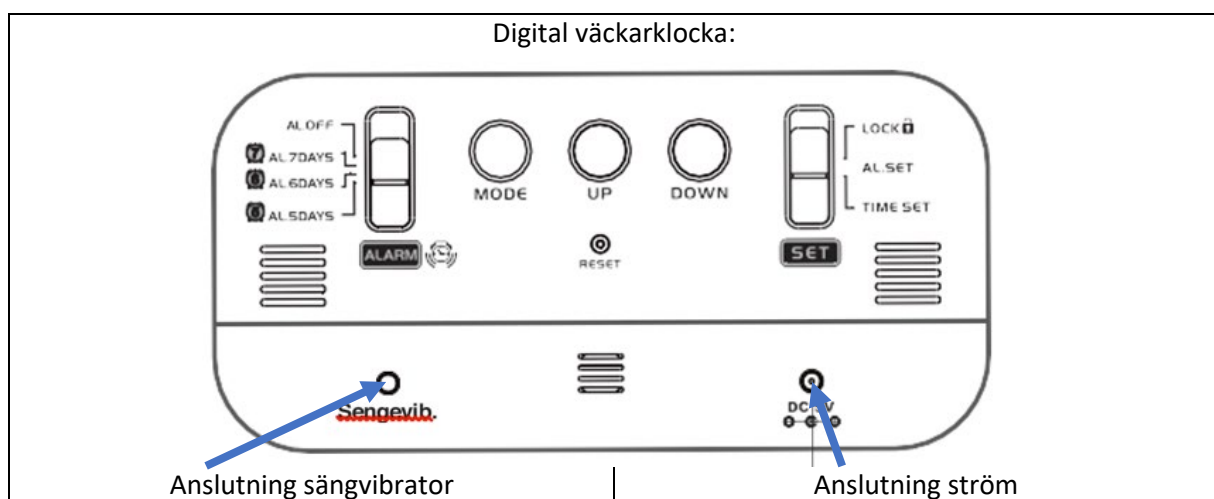
Kuddvibratoren har ett inbyggt nödströmsbatteri och kommer därmed att fortsätta normal drift i minst 48 timmar vid strömavbrott. Den har också inbyggd trådlös laddningsfelmeddelande, och kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av förlust av laddningsström.



DIGITAL VÄCKARKLOCKA används med Kuddvibratorn, som tillsammans varnar med ljud och vibrationer vid väckningstid. Klockan har repetitions-/snooze-funktion.

Klockan visar tiden (med siffror) i siffrerutan (display). Kuddvibratorn startar vid uppvaknandet. Knappen högst upp på klockan (snooze-knappen) används för tillfällig avstängning och avslutning av larmet. Larmet avslutas med att du trycker på snooze-knappen två gånger. Den aktiveras sedan igen vid nästa väckningstid. Om du trycker på knappen en gång försenas larmet i fem minuter. Digital väckarklocka larmar i två minuter. Det larmar inte vid strömavbrott.


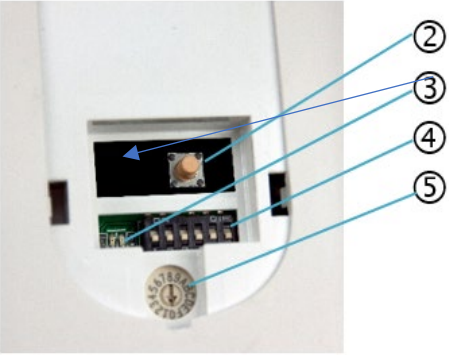
Digital väckarklocka drivs av ström från den medföljande strömförsörjningen. Den är utrustad med ett reservbatteri som behåller sina inställningar vid strömavbrott.





ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 20347165356

	<p>Sängvibrator med ansluten sladd för väckarklocka och strömförsörjning.</p> <p>1 Öppna locket här.</p>
	<p>2. LIFE-knapp (sammankoppling) 3. Ljusindikator 4. Funktionsbrytare 5. Lägesbrytare</p>

KOMMA IGÅNG

Digital väckarklocka:

1. Anslut strömförsörjningen till väggkontakten.
 2. Sätt in pluggen från kuddvibratorn.
- Nu är kuddvibratorn kopplad till väckerklockan.

Batteribackup: Avlägsna röd plaststripe for att koppla in batteri-backup.



Kuddvibrator: Kuddvibratorns huvuddel kan monteras på sänggavel, vägg eller sängbord.

Vibratorn placeras normalt under toppmadrassen i höjd med kudden eller strax under kudden. Den kan med fördel placeras i ett örngott som fästs med säkerhetsnålar på madrassen.

Se till att tråden till vibratorn inte utsätts för sträckning.

FUNKTIONER DIGITAL VÄCKARKLOCKA

1. Display: Timme + minut
2. Alarm: ALARM-brytaren har fyra funktioner: «Alarm AV», «Alarm 7 dagar (mån-sön)», Alarm 6 dagar (mån-lör)», Alarm 5 dagar (mån-fre).
3. Ljusstyrka: Välj önskad ljusstyrke för dag-/nattvisning genom att trycka «DOWN-knappen».
4. Klocka, alarm, datum: Tryck «MODE»-knappen för att se vald alarmtidpunkt och datum.

Ställa in klockan/datumet:

Flytta "SET"- omkopplare till "TIME SET". Använd knappen " UPP" och "NER" för att ställa in timmen. Tryck på "MODE" för att ställa in år och datum. Ställ omkopplaren på "LOCK" när du är klar.

Tysta larm;

Flytta "SET" -omkopplaren till "AL. SET." Använd knapparna "UPP" och "NER" för att ställa in mötet. Tryck på "MODE" för att ställa in minuterna. Ställ in "ALARM" -knappen till önskad position (Larm av, Larm 7 dagar, Larm 6 dagar, Larm 5 dagar). Larmsymbolen visas i displayen när larmet aktiveras. Ställ omkopplaren på "LOCK" när du är klar.

Stäng av larmet:

Tryck två gånger på "SNOOZE" -knappen för att stänga av larmet. Larmet upprepar sig efter 24 timmar. Larmindikatorn lyser konstant. Om du vill stänga av larmet permanent är "ALARM" -omkopplaren inställd på "AL. OFF."

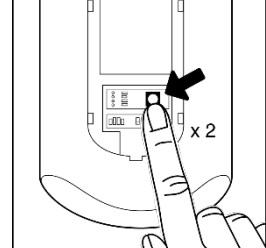
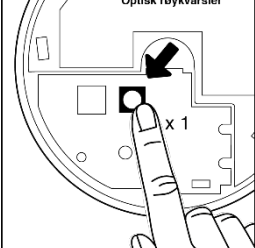
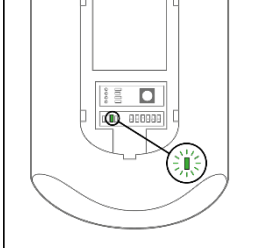
Upprepning (Snooze):

Genom att trycka på "SNOOZE" -knappen en gång under larmet stängs larmet tillfälligt av i 5 minuter.



Kuddvibrator:

Sammankoppling till FlexiBlink LIFE Sändare och Mottagare

		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.</p>	<p>2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>

ANSLUTNING AV NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Parningen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera ihopkopplingen.

KOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den sammankopplades, misslyckades den. Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 20347165356

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där anslutningen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se avsnittet "Utökade funktioner".

DAGLIG ANVÄNDNING

Underrättelse:

Händelser som upptäcks i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med vibration.

UTÖKADE FUNKTIONER:

Kuddvibratoren är utrustad med en funktionsomkopplare och en lägesomkopplare bakom frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningen om du inte behöver funktionerna som förklaras i det här kapitlet.

Välja funktioner (funktionsomkopplare 4):

Grannmeddelande - switch 1

För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för installationen. Då är alla anmälningsmottagare inställda på att meddela vid brand eller inbrott hos berörda grannar.

Om du inte vill att Kuddvibratoren ska meddela till grannarna kan du trycka strömbrytare 1 uppåt.

Kuddvibratoren kopplas sedan bort från grannlarmet.

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon och dörrklocka.

Trådlöst väckarklocka - switchar 2 och 3

IRIS LIFE kan skicka larmsignal trådlöst till Kuddvibratoren. Det finns möjlighet till två kanaler (A och B). Det betyder att om du har två IRIS LIFEs kan dessa skicka en larmsignal till var och en av deras sängvibratorer. Switch 2 styr kanal A och switch 3 styr kanal B. Båda kanalerna är aktiverade som standard.

Om du vill inaktivera trådlös väckning kan du trycka switch 2 och/eller switch 3 uppåt.



Art. Nr. 20347165356

Forcerad stillestånds brytare 6

Om Kuddvibratoren ska stängas av helt, t.ex. under transport, trycks strömbrytare 6 upp eller ner (endast byte av strömbrytarläge krävs) innan strömkontakten dras ur. Det kan också göras efter att strömkontakten har tagits bort. Sängvibratoren stängs av och kan bara startas igen när den är ansluten till ett eluttag.

OBS! Om strömbrytaren vrids medan sängvibratoren är på med laddningsspänning på, återgår den till normal drift om nätadaptern inte dras ur vägguttaget inom 2 minuter.

Kombinationer av funktionerna kan göras fritt efter behov med omkopplare 1 till 3. Omkopplare 4 och 5 är reserverade för framtida behov.

Välj läge (lägesomkopplare 5):

Vibration vid alla signaler (0)

Detta är fabriksinställningen. Kuddvibratoren varnar dig nu för alla signaler - både dagligen och larm.

Vibration endast för larm (1)

Om du vill att Kuddvibratoren inte ska meddela dig om dörrklocka och telefon kan du ställa vändaren i läge 1. Sängvibratoren kommer nu endast att larma - förhållanden av säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.).

OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.

Vibration endast vid brand (2)

Om du vill att sängvibratoren endast ska larma vid BRAND kan du ställa omkopplaren i läge 2. Kuddvibratoren kommer nu endast att larma om brandlarm (rökvarnare och brandklocksändare). OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 20347165356

VIKTIG INFORMATION KUDDVIBRATOR:

Kuddvibratorn har två lampor, en grön och en röd. Den gröna lampan lyser konstant under strömdrift och blinkar under batteridrift. När Kuddvibratorn laddas lyser den röda lampan. Denna lampa växlar mellan på och av eftersom produkten laddas automatiskt vid behov.

Kuddvibratorn har inbyggt temperaturskydd och strömskydd och använder säker NiMH batteriteknik med en skonsam laddningscykel. Den har kontinuerlig övervakning inbyggd, så den kommer inte att utgöra någon risk eller fara när den används på rätt sätt.

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Produkten är avsedd för inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISKA DATA

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftsspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 20347165356

VIKTIG INFORMATION DIGITAL VÄCKARKLOCKA:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Produkten är för inomhusbruk.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Återvinning

Produkten och batterier skall ej kastas ihop med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallsdeponering av elektriska produkter.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

Tekniska data:

Dim. (bxhxd):	173x85x50mm	Driftsspänning:	5VDC
Ingångsspänning:	240V DC	Utgångsspänning:	5V DC
Utgångsström	1A	Nominell effekt:	5W
DC-port	1 x USB		

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Blir inte ansluten - ind. Lampan lyser rött	Anslutningen misslyckas pga för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan sammankopplad med andra enheter.	Återställ sammankopplingen. Var god försök igen.
	Felaktig ordning i parningen	Tryck på LIFE-knappen två gånger på en enhet i det befintliga systemet och bara en gång på den nya enheten
Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter parning	Har en enhets LIFE-knapp tryckts in två gånger?	Tryck på LIFE-knapparna igen för att avbryta. Försök igen.
	Letar fortfarande efter nya enheter.	Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 20347165356

Anmälan ej mottagen	Inte ansluten	Koppla bort den senaste enheten och anslut igen
	Lägesomkopplaren är inställd på läge 1 eller 2	Ställ lägesomkopplaren i rätt läge
	Brist på täckning	Försök att flytta enheterna närmare varandra eller ställa in en repeater
	Avsändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
	Tömt batteri i sändaren	Byt ut batteriet i sändaren
	Enheten är felaktigt ansluten.	Återställ sammankopplingen på enheten och lägg till igen.
	Grannlarm	Kontrollera att funktionsomkopplaren för grannmeddelanden är korrekt.
	Nödbatteriet är svagt.	Ring service.
Kuddvibrator varnar händelser, men inga sändare aktiveras i hemmet.	Enheten är inte ansluten	Anslut enheten till en mottagare
Blir inte ansluten - ind. Lampan lyser rött	Ingen mottagare är ansluten till sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återanslut. försök igen
	Anslutningen misslyckas pga för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan ansluten med andra enheter.	Återställ sammankopplingen. Var god försök igen.

