



Digital Väckarklocka med Kuddvibrator Produktblad



Kuddvibrator är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet.

DIGITAL VÄCKARKLOCKA används med Kuddvibratorn, som tillsammans varnar med ljud och vibrationer vid väckningstid. Klockan har repetitions-/snooze-funktion.

Komma i gång

Digital väckarklocka:

1. Anslut strömförsörjningen till väggkontakten.
2. Sätt in pluggen från kuddvibratorn.

Nu är kuddvibratorn kopplad till väckarklockan.

Batteribackup: Avlägsna röd plaststripe för att koppla in batteri-backup.

Kuddvibrator: Kuddvibratorns huvuddel kan monteras på sänggavel, vägg eller sängbord.

Vibratorn placeras normalt under toppmadrassen i höjd med kudden eller strax under kudden. Den kan med fördel placeras i ett örngott som fästs med säkerhetsnålar på madrassen.

Sammankoppling av Kuddvibrator till FlexiBlink LIFE Sändare og Mottagare

Läs instruktionerna för kuddvibratorn för hur du parar ihop med andra sändare och mottagare.

Tekniska data

Kuddvibrator:

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C





ICAP
Individual Computer Applications























Art nr. 20347165349

Digital väckarklocka:

Dim. (bxhxd):	173x85x50mm	Driftsspänning:	5VDC
Ingångsspänning:	240V DC	Utgångsspänning:	5V DC
Utgångsström	1A	Nominell effekt:	5W
DC-port	1 x USB		

Relaterade produkter:

Väckningshjälpmedel	
	
IRIS	Sängvibrator

<p><u>Brandlarm:</u></p>   			<p><u>Dörr- och porttelefon</u></p>   		
<p><u>Telefoni:</u></p>  		<p><u>Annan larm og kallelse:</u></p>    			
<p><u>Vandring och passage:</u></p>      					
<p><u>Larmmottagare:</u></p>      					

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50