

## Digital Väckarklocka med Sängvibrator Produktblad



SÄNGVIBRATOR är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet.

DIGITAL VÄCKARKLOCKA används med Sängvibratorn, som tillsammans varnar med ljud och vibrationer vid väckningstid. Klockan har repetitions-/snooze-funktion.

### Komma i gång

#### Digital väckarklocka:

1. Anslut strömförsörjningen till väggkontakten.
2. Sätt in pluggen från sängvibratorn.

Nu är sängvibratorn kopplad till väckerklockan.

Batteribackup: Avlägsna röd plaststripe för att koppla in batteri-backup.

**Sängvibrator:** Sängvibratorn placeras mellan madrasserna i sängen eller mellan madrassen och sänggaveln. Anslut strömförsörjningen till vägguttaget

### Sammankoppling av Sängvibrator till FlexiBlink LIFE Sändare og Mottagare

Läs instruktionerna för sängvibratorn för hur du parar ihop med andra sändare och mottagare.

### Tekniska data


#### Sängvibrator

























Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Digital väckarklocka:

Dim. (bxhxd):	173x85x50mm	Driftsspänning:	5VDC
Ingångsspänning:	240V DC	Utgångsspänning:	5V DC
Utgångsström	1A	Nominell effekt:	5W
DC-port	1 x USB		

Relaterade produkter:

Väckningshjälpmedel	
	
IRIS	Kuddvibrator

<p><b>Brandlarm:</b></p>    <p>Optisk Rökvarnare      Termisk Brandvarnare      Brandsändare</p>			<p><b>Dörr- och porttelefon</b></p>    <p>Tryckknapps-sändare      Dörrklocka sändare      Dörr- och porttelefonsändare</p>		
<p><b>Telefoni:</b></p>   <p>Mobiltelefon-sändare      Telefon-sändare</p>		<p><b>Annan larm og kallelse:</b></p>     <p>Ella smycke-sändare      Armbands-larm sändare och -mottagare      Barnvakt      Välfärds-sändare</p>			
<p><b>Vandring och passage:</b></p>       <p>Tidsinställd aktivitetslarm      Röstlarm      PIR Gardin sensor      PIR Mini sensor      Magnetbrytare      Sängmatta</p>					
<p><b>Larmmottagare:</b></p>       <p>AURORA      Junior      NORA      Sängvibrator      Kuddvibrator      IRIS</p>					