

IRIS Life Larmmottagare Produktblad



IRIS är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem.

FlexiBlink LIFE används för att meddela om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvakter samt dagliga händelser som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter.

Varningar utlöses när en FlexiBlink Brandvarnare upptäcker rök eller en FlexiBlink Telefonsändare uppfattar att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla aviseringsmottagare i hemmet.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten.
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Funktionsbrytare



1	2	3	4	5	6	Beskrivelse
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Standard: Alla aktiva notiser utom röst, sängvibratorkanal A, meny och volym öppen
ON						Endast larm, inte dagliga aviseringar
	ON					Grannvarning inaktiverad
		ON				Röstvarning inaktiverad
			ON			Sängvibrator: Kanal B aktiv
				ON		Meny och volym är låsta



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471653

Relaterade produkter:

<u>Brandlarm:</u>			<u>Dörr- och porttelefon</u>		
					
Optisk Rökvarnare	Termisk Brandvarnare	Brandsändare	Tryckknapps-sändare	Dörrklocka sändare	Dörr- och porttelefons ändare
<u>Telefoni:</u>		<u>Annan larm og kallelse:</u>			
					
Mobiltelefon-sändare	Telefon-sändare	Ella smycke-sändare	Armbands-larm sändare och -mottagare	Barnvakt	Välfärds-sändare
<u>Vandring och passage:</u>					
					
Tidsinställd aktivitetslarm	Röstlarm	PIR Gardin sensor	PIR Mini sensor	Magnetbrytare	Sängmatta
<u>Larmmottagare:</u>					
					
AURORA	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	218x165x40 mm (utan väggfäste och fot).	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt utan strömförsörjning:	800 g	Driftspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50