

Junior Universell Produktblad



JUNIOR Tillkalling är en produkt i FlexiBlink LIFE-familjen. Den är avsedd för vårdgivare som ansvarar för brukare som behöver tillsyn. Den anger 5 specifika anmälningsskäl med ljud och vibration, samt att ha en "gemensam" anmälan av andra anmälningsskäl. Du kan ha JUNIOR Tillkalling i fickan eller ha den runt i halsen i halssnöret. JUNIOR Tillkalling är uppladdningsbar och batteriet håller normalt i ca 2 dygn.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.







AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Varningar


















Varningsorsak	Ljus i symbol	Vibrations-mönster			
Kom nu	1	Korta pulser	1	 	4
Kom snart	2	Långa pulser			
Signal 1 (betydelse avtalas med brukare)	3	Korta pulser			
Signal 2 (betydelse avtalas med brukare)	4	Långa pulser	2	 	5
Epilepsi	5	Korta pulser			
Andra larm	6	Långa pulser			
			3	 	6



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471652

Relaterade produkter:

<u>Annand larm og kallelse:</u>					
					
Ella smycke-sändare	Armbands-larm sändare och -mottagare	Barnvakt	Välfärds-sändare	Tryckknapps-sändare	
<u>Vandring och passage:</u>					
					
Tidsinställd aktivitetslarm	Röstlarm	PIR Gardin sensor	PIR Mini sensor	Magnetbrytare	Sängmatta
<u>Larmmottagare:</u>					
					
AURORA	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	IRIS

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 g	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz		