

Junior Universell Produktblad



JUNIOR Vandringslarm är en produkt i FlexiBlink LIFE-familjen. Den är avsedd för vårdgivare som är ansvariga för användare, som kan komma att förflytta sig oavsiktligt.

Den anger 5 specifika förflyttningsorsaker, plus att den har en "gemensam" varning för andra varningsorsaker.

Du kan ha JUNIOR Vandringslarm i fickan eller ha den runt i halsen i halssnöret.

JUNIOR Vandringslarm är uppladdningsbar och batteriet håller normalt i ca 2 dygn.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten.
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Varningar

Varningsorsak	Ljus i symbol	Vibrations-mönster	
Rörelse inne	1	Korta pulser	
Rörelse ute	2	Långa pulser	
Passagealarm	3	Korta pulser	
Frånvaro från säng	4	Långa pulser	
Barnet har gått upp	5	Korta pulser	
Andra larm	6	Långa pulser	



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471651

Relaterade produkter:

<u>Vandring och passage:</u>					
					
Tidsinställd aktivitetslarm	Välfärds-sändare	PIR Gardin sensor	PIR Mini sensor	Magnetbrytare	Sängmatta
<u>Larmmottagare:</u>					
					
AURORA	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	IRIS

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 g	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz		