

Junior Universell Produktblad



JUNIOR Universell är en produkt i FlexiBlink LIFE-familjen. Den är avsedd för hörselsnedsatta för användning i hem, på jobbet, i skolan och på fritiden.

Den anger 10 specifika anmälningsskäl med ljud og vibration, samt att ha en "gemensam" anmälan av andra anmälningsskäl.

Du kan ha JUNIOR Universell i fickan eller ha den runt i halsen i halssnöret.

JUNIOR Universell är uppladdningsbar och batteriet håller normalt i ca 2 dygn.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Varningar






















Varningsorsak	Ljus i symbol	Vibrations-mönster	
Dörrklocka	1	Korta pulser	
Porttelefon	1	Långa pulser	
Brand - Brandvarnare	2	Korta pulser	
Brand – Central	2	Långa pulser	
Telefon	3	Korta pulser	
Mobiltelefon	3	Långa pulser	
Barnet har stått opp	4	Korta pulser	
Barn gråter	4	Långa pulser	
Anrop - dagligen	5	Korta pulser	
Anrop - larm	5	Långa pulser	
Vandring inne / andra dagligen	6	Korte pulser	
Vandring ute / andra larm	6	Långa pulser	



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471654

Relaterade produkter:

<u>Brandlarm:</u>  Optisk Rökvarnare  Termisk Brandvarnare  Brandsändare			<u>Dörr- och porttelefon</u>  Tryckknapps-sändare  Dörrklocka sändare  Dörr- och porttelefonsändare		
<u>Telefoni:</u>  Mobiltelefon-sändare  Telefon-sändare		<u>Annan larm og kallelse:</u>  Ella smycke-sändare  Armbands-larm sändare och -mottagare  Barnvakt  Välfärds-sändare			
<u>Vandring och passage:</u>  Tidsinställd aktivitetslarm  Röstlarm  PIR Gardin sensor  PIR Mini sensor  Magnetbrytare  Sängmatta					
<u>Larmmottagare:</u>  AURORA  Junior  NORA  Sängvibrator  Kuddvibrator  IRIS					

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 g	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz		

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50