

FlexiBlink - Mobiltelefonsändare

Bruksanvisning



FlexiBlink Mobiltelefonsändare är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare att mobiltelefonen ringer.

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan användas för de flesta varseblivningsuppgifter i ett hem eller på en arbetsplats, och systemet är enkelt att installera.

Mobiltelefonsändaren används när användaren inte bär telefonen.


Mobiltelefonsändare har inbyggda funktioner för att vidarebefordra flera telefonlarm. Användaren kan också justera känslighetsnivåerna för att justera ringvolymen.

Mobiltelefonsändare använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

BATTERI OCH LADDNING:

Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer att enheten fungerar i många år. OBS! Ladda INTE batteriet.

ÖVERSIKT:

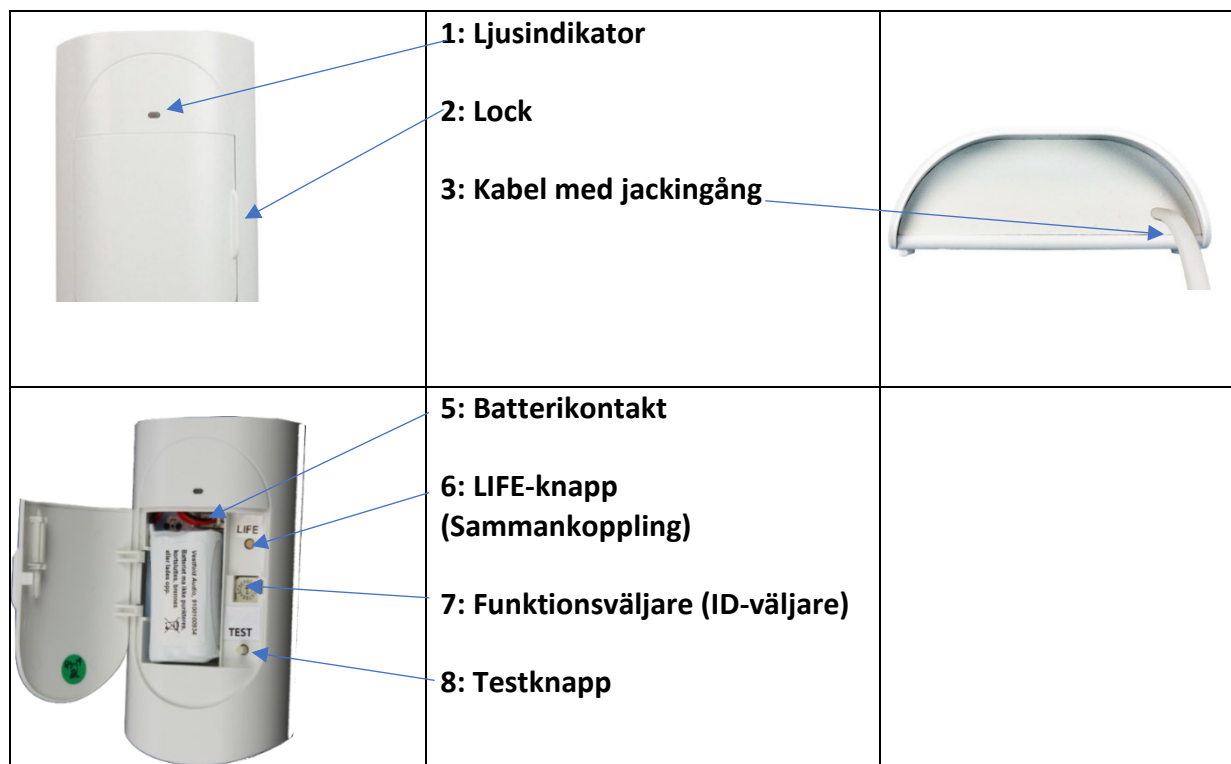

KOM I GÅNG:

Anslut batteriet till uttaget (5). Mobiltelefonsändaren kan blinka grönt i upp till några minuter medan batteriet förbereds för långvarig användning.

SAMMANKOPPLING:

Alla enheter i ett system måste sammankopplas före användning. OBS! Kontrollera om enheten redan är sammankopplad innan du utför den här proceduren.



Art. Nr.: 203471639

- 1: Tryck två gånger på LIFE-knappen (7) på en av enheterna. Lysdioden (2) blinkar grönt.
- 2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Lysdioden blinkar grönt.
- 3: Sammankopplingen bekräftas av båda ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
- 4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen (11) för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT EN ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM:

- 1: Tryck två gånger på LIFE-knappen på enheten i det befintliga systemet.
- 2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
- 3: Anslutningen bekräftas av ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
- 4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera sammankopplingen.

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN:

Tryck en gång på LIFE-knappen för att avbryta sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten är sammankopplingen misslyckad. Du måste återställa enheten innan du ansluter igen.

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN:

- 1: Tryck på LIFE-knappen fem gånger för att återställa sammankopplingen.

VÄLJ FUNKTION (ID-VÄLJARE)

Mobiltelefonsändaren kan varna flera telefoner. Vrid funktionsväljaren till det läge som motsvarar det som ska meddelas i aviseringsmottagarna.

Använd den korta änden av verktyget som sitter i locket.


| ID | VARNAR OM | KÄNSLIGHET | ID | VARNAR OM | KÄNSLIGHET |
|-------------------------------------|-----------|--|----|------------------------|------------|
| Individual Computer Applications AB | | E-post: info@icap.nu | | Telefon: 010-405 68 50 | |
| Karl Johansgatan 42 | | Webb: www.icap.nu | | | |
| 414 59 GÖTEBORG | | Org.nr: 556573-8746 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|---|---------------------|--------|
| 0 | Mobiltelefon | Normal | 8 | Mobiltelefon nr 2 | Lav |
| 1 | Mobiltelefon nr 1 | Normal | 9 | Mobiltelefon | Høy |
| 2 | Mobiltelefon nr 2 | Normal | A | Mobiltelefon nr 1 | Høy |
| 3 | Mobiltelefon nr 3 | Normal | B | Mobiltelefon nr 2 | Høy |
| 4 | Mobiltelefon nr 4 | Normal | C | Mobiltelefon + Ekom | Normal |
| 5 | Mobiltelefon nr 5 | Normal | D | Mob. 1 + Ekom | Normal |
| 6 | Mobiltelefon nr | Lav | E | Mob. 2 + Ekom | Normal |
| 7 | Mobiltelefon nr 1 | Lav | F | Ekom | Normal |

EKOM är en uppsättning speciella ljud som mobiltelefonsändaren känner igen och kommer att meddela en specifik händelse. Genom att använda dessa speciella ljud på mobiltelefonen eller PC:n kan man skilja på notiser som SKYPE, EMAIL, SMS, VIP Call. Ljuden kan laddas ner från m.flexiLIFE.no, eller kontakta ICAP.

TILLKOPPLING:

Använd kabeln som är ansluten till mobiltelefonsändaren. Sätt i kontakten i hörlursuttaget på mobiltelefonen

Den mobila ringsignalens volym är inställd på minst halv volym. Prova vilka ringsignaler Mobiltelefonsändaren uppfattar och justerar volymen för Mobiltelefonsändarvarningar. Använd ID-omvandlaren för att ställa in rätt känslighetsnivå. Känslighetshjul Fig. 4  kan även justeras upp eller ner för att finjustera varningsnivån för Mobiltelefonsändaren.

MONTERING:

Mobiltelefonsändaren monteras normalt på väggen med medföljande kardborreband. Använd den medföljande spritservetten för att rengöra väggen. Tryck fast de självhäftande ytorna ordentligt i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten skruvas fast i väggen genom monteringshålet under batteriet.

DAGLIG ANVÄNDNING:

Ljusedioder: När enheten är i drift visas statusen i ljusedioden på framsidan:

Släckt: Stand-by

Grönt: Meddelande skickas

Blinkande rött/grönt: Byt batteri

Ringsignalen på analoga telefonlinjer larmar med 1 sekunds ringning, följt av 4 sekunders tystnad. Om ID 4-7 används kan det ta upp till 6 sekunder från det att du lyfter luren tills mottagaren slutar meddela dig.



Art. Nr.: 203471639

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Endast tillåten användning inom EU/EES. Produkten meddelar mottagarna om det är behov av batteribyte.

ÅTERVINNING:

Kassera inte produkten eller batteriet med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för bortskaffande av elektriska produkter.

SÄKERHET:

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Kortslut eller skruva inte isär produkten.

TEKNISK DATA:

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Dim. (bxhxd) | 69x133x27 mm | Temperatur | -10°C +40°C |
| Vikt m/batteri | 140 g | Radiofrekvens | 868.1 – 869.85 MHz |
| Sändarens effekt: | 10 mW e.r.p. | Batteri | Litium 3 V |

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING:

| Problem | Möjlig orsak | Lösningar |
|-------------------------------|--|--|
| Den meddelar inte i mottagare | Mobiltelefonsändaren tar inte emot en signal från källan / den lyser inte grönt. | Tryck på testknappen och kontrollera om meddelandet visas. |
| | Kontakten är inte korrekt ansluten | Kontrollera att kontakten sitter ordentligt fast |
| | Ljudet är inte tillräckligt högt | Höj volymen på det ringande ljudet, välj eventuellt ett annat ringljud |

| | | |
|--|--|--|
| | Avståndet mellan Mobiltelefonsändaren och mottagaren är för stort. | Flytta enheterna närmare varandra eller sätt i en repeater. |
| | Batteriet i Mobiltelefonsändaren är tomt / det blinkar rött. | Byt batteri. |
| | Mobiltelefonsändaren saknar batteri | Sätt i batteriet. |
| Parkoppling fungerar inte | Båda enheterna har parats ihop tidigare. Det blinkar rött. | Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten som ska läggas till. |
| Efter TEST-tryck lyser sändaren rött | Enheten är inte ihopkopplad med någon | Anslut enheten till en mottagare |
| Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan orange under lång tid | Ingen mottagare är ihopkopplad med sändaren | Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återkoppla. Försök igen |
| Orange korta blinkningar i sändaren | Volymen är för låg | Höj volymen eller växla till ett annat ringande ljud. Om det behövs ändrar du känsligheten med hjälp av ID-väljaren. |
| Orange blix | Telefonen ringer | Sändaren blinkar orange när telefonen ringer. Lyser grönt vid sändning. |
| Det går inte att ansluta till telefonen | Annan ljudutgång på din telefon | Sändaren stöder 3,5 mm jackkontakt. Kontrollera vid behov med leverantören om det finns en övergång till 3,5 mm-uttaget. |
| Den varnar med fel signal i mottagare. | Funktionsväljaren (ID) är i fel position. | Vrid funktionsväljaren till rätt position. |
| Den meddelar i sändaren utan att mobilen ringer | Kan ha fått andra aviseringar med ljud på din mobil, t.ex. SMS, aviseringar, låg effekt. | Kontrollera inställningarna på din telefon så att dessa inte ger ett ljud. |



VARNING:

Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet.

