

Mobiltelefonsändare Produktblad



FlexiBlink Mobiltelefonsändare är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare att mobiltelefonen ringer.

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan användas för de flesta varseblivningsuppgifter i ett hem eller på en arbetsplats, och systemet är enkelt att installera.

Mobiltelefonsändaren används när användaren inte bär telefonen. Mobiltelefonsändare har inbyggda funktioner för att vidarebefordra flera telefonlarm. Användaren kan också justera känslighetsnivåerna för att justera ringvolymen.

Mobiltelefonsändare använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten.
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Funktionsbrytare

ID	VARNAR OM	KÄNSLIGHET	ID	VARNAR OM	KÄNSLIGHET
0	Mobiltelefon	Normal	8	Mobiltelefon nr 2	Lav
1	Mobiltelefon nr 1	Normal	9	Mobiltelefon	Høy
2	Mobiltelefon nr 2	Normal	A	Mobiltelefon nr 1	Høy
3	Mobiltelefon nr 3	Normal	B	Mobiltelefon nr 2	Høy
4	Mobiltelefon nr 4	Normal	C	Mobiltelefon + Ekom	Normal
5	Mobiltelefon nr 5	Normal	D	Mob. 1 + Ekom	Normal
6	Mobiltelefon nr	Lav	E	Mob. 2 + Ekom	Normal
7	Mobiltelefon nr 1	Lav	F	Ekom	Normal



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471639

Relaterade produkter:



Tekniska data

Dim. (bxhxd)	69x133x27 mm	Temperatur	-10°C +40°C
Vikt m/batteri	140 g	Radiofrekvens	868.1 – 869.85 MHz
Sändarens effekt:	10 mW e.r.p.	Batteri	Litium 3 V