

## NORA Flexiwatch Produktblad



NORA är ett armbandsur som larmar FlexiBlink LIFE-larm och dagliga signaler med vibrationer, symboler och ljud.

Klockdisplayen aktiveras med ett enda tryck på skärmen. I händelse av ett larm visas en symbol och text på skärmen samtidigt med vibrations- och ljudvarning för larmet. Både ljud- och vibrationsvarning använder olika varningsmönster för olika larm. På detta sätt kan hörselskadade och synskadade enkelt skilja mellan dagliga aviseringar och larm.

NORA laddas med den medföljande USB-laddaren.

### Sammankoppling

NORA går automatiskt till parningsmenyn när du först ansluter USB-laddaren. De flesta FlexiBlink LIFE-produkter använder en separat LIFE-knapp för parkopplingen. LIFE-knappen finns vanligtvis under enhetens lock. (Se bruksanvisningen för den aktuella produkten om du inte hittar LIFE-knappen).

1. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen på den andra enheten
2. Välj "Koble til LIFE-nett» på Nora

#### **ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:**

1. Välj "Inställningar" och sedan "Anslutning".
2. Välj "Anslut till LIFE-nätverk".
3. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på en enhet i ett system som NORA-L kommer att paras ihop med.
4. Parningen bekräftas av klockan.
5. Tryck på "Test" -knappen på en sändare för att kontrollera parningen.

#### **DELA ELLER STARTA LIFE-NET FRÅN NORA**

1. Välj "Inställningar" och sedan "Anslutning".
2. Välj "Dela mitt LIFE-nätverk".
3. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den nya enheten.
4. Parningen bekräftas av klockan.
5. Tryck på "Test" -knappen på en sändare för att kontrollera parningen.

#### **AVBRYT SAMMANKOPPLING:**

För att avbryta parkopplingen, tryck på LIFE-knappen på en enhet en gång eller tryck på "Avbryt" på din klocka.

#### **ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:**


1. Välj "Inställningar" och sedan "Anslutning".
2. Välj "Lämna LIFE-enhet".
3. Återställningen bekräftas genom att visa texten "Ej ansluten till LIFE-nätverket".



**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr. 203471910

Relaterade produkter:

<u>Brandlarm:</u>			<u>Dörr- och porttelefon</u>		
 Optisk Rökvarnare	 Termisk Brandvarnare	 Brandsändare	 Tryckknapps-sändare	 Dörrklocka sändare	 Dörr- och porttelefons ändare
<u>Telefoni:</u>		<u>Annan larm og kallelse:</u>			
 Mobiltelefon-sändare	 Telefon-sändare	 Ella smycke-sändare	 Armbands-larm sändare och -mottagare	 Barnvakt	 Välfärds-sändare
<u>Vandring och passage:</u>					
 Tidsinställd aktivitetslarm	 Röstlarm	 PIR Gardin sensor	 PIR Mini sensor	 Magnetbrytare	 Sängmatta
<u>Larmmottagare:</u>					
 AURORA	 Junior	 NORA	 Sängvibrator	 Kuddvibrator	 IRIS

Tekniska data

Dim. (lxb):	260x43mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	50g	Laddningsspänning:	5V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Omkrets:	15-23 cm		

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 42  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50