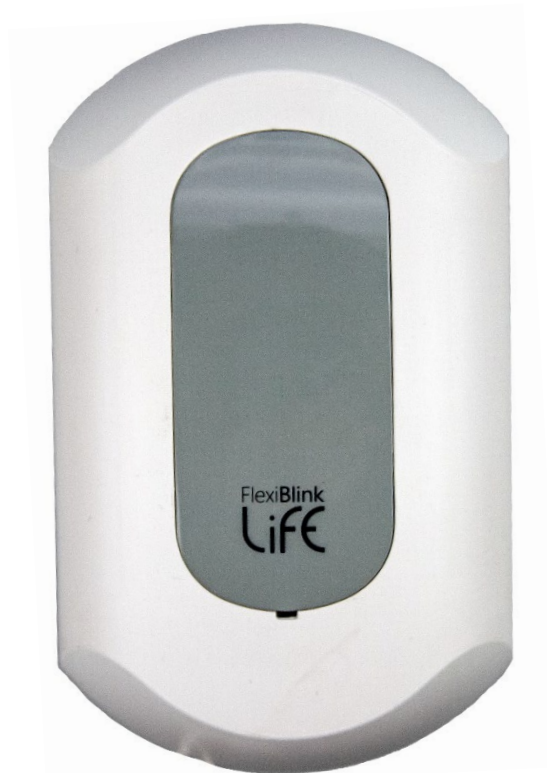




ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471649

Sängvibrator med nödbatteri och trådlös laddningsfelvarning Bruksanvisning



SÄNGVIBRATOR är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet. Sängvibratorn meddelar dig om dagliga incidenter och förhållanden av mer säkerhetskaraktär, allt beroende på vilka detektorer/sändare som är installerade och hur sängvibratorn är konfigurerad.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50

För dagliga meddelanden inkluderar vi avisering av dörrklocka och telefon. Trygghetslarm kan vara till exempel spisvakt och brandvarnare.

Sängvibratoren kan kopplas till en väckarklocka eller så kan du använda larmfunktionen i IRIS LIFE som fungerar trådlöst. Sängvibratoren kommer att väcka genom att vibrera med samma intensitet som med dagliga signaler. Vibrationen upphör automatiskt efter 2 minuter om väckarklockan inte stängs av.

Sängvibratoren har ett inbyggt nödströmsbatteri och kommer därmed att fortsätta normal drift i minst 48 timmar vid strömavbrott. Den har också inbyggd trådlös laddningsfelmeddelande, och kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av förlust av laddningsström.

	<p>Sängvibrator med ansluten sladd för väckarklocka och strömförsörjning.</p> <p>1 Öppna locket här.</p>
	<p>2. LIFE-knapp (sammankoppling)</p> <p>3. Ljusindikator</p> <p>4. Funktionsbrytare</p> <p>5. Lägesbrytare</p>

KOMMA IGÅNG

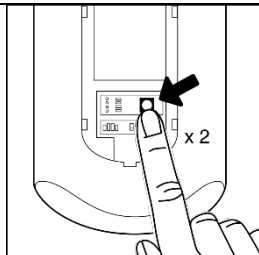
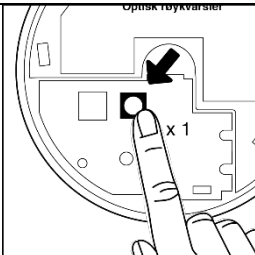
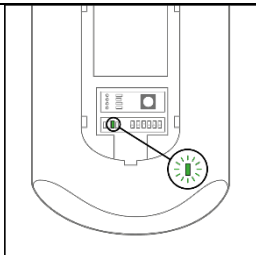
Placering

Sängvibratoren placeras mellan madrasserna i sängen eller mellan madrassen och sänggärden.

Förbindelse

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget. Om en väckarklocka ska användas, anslut väckarklockans kabel från sängvibratoren till väckarklockan.

SAMMANKOPPLING

		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.</p>	<p>2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>

ANSLUTNING AV NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Parningen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera ihopkopplingen.



Art. Nr. 203471649

KOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den sammankopplades, misslyckades den. Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där anslutningen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se avsnittet "Utökade funktioner".

DAGLIG ANVÄNDNING

Underrättelse:

Händelser som upptäcks i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med vibration.

UTÖKADE FUNKTIONER:

Sängvibratoren är utrustad med en funktionsomkopplare och en lägesomkopplare bakom frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningen om du inte behöver funktionerna som förklaras i det här kapitlet.

Välja funktioner (funktionsomkopplare 4):

Grannmeddelande - switch 1

För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för installationen. Då är alla anmälningsmottagare inställda på att meddela vid brand eller inbrott hos berörda grannar.

Om du inte vill att Sängvibratoren ska meddela till grannarna kan du trycka strömbrytare 1 uppåt. Sängvibratoren kopplas sedan bort från grannlarmet.

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon och dörrklocka.

Trådlös väckarklocka - switchar 2 och 3

IRIS LIFE kan skicka larmsignal trådlöst till sängvibratoren. Det finns möjlighet till två kanaler (A och B). Det betyder att om du har två IRIS LIFEs kan dessa skicka en larmsignal till var och en av deras sängvibratorer. Switch 2 styr kanal A och switch 3 styr kanal B. Båda kanalerna är aktiverade som standard. Om du vill inaktivera trådlös väckning kan du trycka switch 2 och/eller switch 3 uppåt.



Art. Nr. 203471649

Forcerad stillestånds brytare 6

Om sängvibratören ska stängas av helt, t.ex. under transport, trycks strömbrytare 6 upp eller ner (endast byte av strömbrytarläge krävs) innan strömkontakten dras ur. Det kan också göras efter att strömkontakten har tagits bort. Sängvibratören stängs av och kan bara startas igen när den är ansluten till ett eluttag.

OBS! Om strömbrytaren vrids medan sängvibratören är på med laddningsspänning på, återgår den till normal drift om nätadaptern inte dras ur vägguttaget inom 2 minuter.

Kombinationer av funktionerna kan göras fritt efter behov med omkopplare 1 till 3. Omkopplare 4 och 5 är reserverade för framtida behov.

Välj läge (lägesomkopplare 5):

Vibration vid alla signaler (0)

Detta är fabriksinställningen. Sängvibratören varnar dig nu för alla signaler - både dagligen och larm.

Vibration endast för larm (1)

Om du vill att sängvibratören inte ska meddela dig om dörrklocka och telefon kan du ställa vändaren i läge 1. Sängvibratören kommer nu endast att larma - förhållanden av säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.).

OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.

Vibration endast vid brand (2)

Om du vill att sängvibratören endast ska larma vid BRAND kan du ställa omkopplaren i läge 2. Sängvibratören kommer nu endast att larma om brandlarm (rökvarnare och brandklocksändare). OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.

VIKTIG INFORMATION:

Sängvibratören har två lampor, en grön och en röd. Den gröna lampan lyser konstant under strömdrift och blinkar under batteridrift. När sängvibratören laddas lyser den röda lampan. Denna lampa växlar mellan på och av eftersom produkten laddas automatiskt vid behov.

Sängvibratören har inbyggt temperaturskydd och strömskydd och använder säker NiMH batteriteknik med en skonsam laddningscykel. Den har kontinuerlig övervakning inbyggd, så den kommer inte att utgöra någon risk eller fara när den används på rätt sätt.

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Produkten är avsedd för inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö.



Art. Nr. 203471649

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISKA DATA

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftsspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Blir inte ansluten - ind. Lampan lyser rött	Anslutningen misslyckas pga för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan sammankopplad med andra enheter.	Återställ sammankopplingen. Var god försök igen.
	Felaktig ordning i parningen	Tryck på LIFE-knappen två gånger på en enhet i det befintliga systemet och bara en gång på den nya enheten

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50



Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter parning	Har en enhets LIFE-knapp tryckts in två gånger?	Tryck på LIFE-knapparna igen för att avbryta. Försök igen.
	Letar fortfarande efter nya enheter.	Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen.
Anmälan ej mottagen	Inte ansluten	Koppla bort den senaste enheten och anslut igen
	Lägesomkopplaren är inställd på läge 1 eller 2	Ställ lägesomkopplaren i rätt läge
	Brist på täckning	Försök att flytta enheterna närmare varandra eller ställa in en repeater
	Avsändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
	Tömt batteri i sändaren	Byt ut batteriet i sändaren
	Enheten är felaktigt ansluten.	Återställ sammankopplingen på enheten och lägg till igen.
	Grannlarm	Kontrollera att funktionsomkopplaren för grannmeddelanden är korrekt.
	Nödbatteriet är svagt.	Ring service.
Sängvibrator varnar händelser, men inga sändare aktiveras i hemmet.	Enheten är inte ansluten	Anslut enheten till en mottagare
Blir inte ansluten - ind. Lampan lyser rött	Ingen mottagare är ansluten till sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återanslut. försök igen
	Anslutningen misslyckas pga för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan ansluten med andra enheter.	Återställ sammankopplingen. Var god försök igen.

