




## Sängvibrator Produktblad

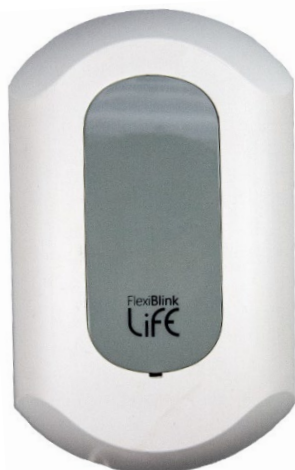

SÄNGVIBRATOR är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet. Sängvibratoren meddelar dig om dagliga incidenter och förhållanden av mer säkerhetskaraktär, allt beroende på vilka detektorer/sändare som är installerade och hur sängvibratoren är konfigurerad.

För dagliga meddelanden inkluderar vi avisering av dörrklocka och telefon. Trygghetslarm kan vara till exempel spisvakt och brandvarnare.

Sängvibratoren kan kopplas till en väckarklocka eller så kan du använda larmfunktionen i IRIS LIFE som fungerar trådlöst.

Sängvibratoren kommer att väcka genom att vibrera med samma intensitet som med dagliga signaler. Vibrationen upphör automatiskt efter 2 minuter om väckarklockan inte stängs av.

Sängvibratoren har ett inbyggt nödströmsbatteri och kommer därmed att fortsätta normal drift i minst 48 timmar vid strömavbrott. Den har också inbyggd trådlös

laddningsfelmeddelande, och kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av förlust av laddningsström.

## Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

### ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

### SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

### AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

### ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

## Funktionsbrytare

1	2	3	4	5	6	Beskrivelse
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Standard:
ON						Grannvarning inaktiverad
	ON					Sängvibrator A inaktiverad
		ON				Sängvibrator B inaktiverad
					On /Off	Forcerad stilleståndsbrytare – byta brytarläge innan du drar ut strömkontakten












**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr. 203471649

## Lägesomkopplare

0: Vibration vid alla signaler – 1: Vibration endast för larm – 2: Vibration endast vid brann

### Relaterade produkter:

<p><b>Brandlarm:</b></p>    <p>Optisk Rökvarnare      Termisk Brandvarnare      Brandsändare</p>			<p><b>Dörr- och porttelefon</b></p>    <p>Tryckknapps-sändare      Dörrklocka sändare      Dörr- och porttelefons ändare</p>		
<p><b>Telefoni:</b></p>   <p>Mobiltelefon-sändare      Telefon-sändare</p>		<p><b>Annan larm og kallelse:</b></p>     <p>Ella smycke-sändare      Armbands-larm sändare och -mottagare      Barnvakt      Välfärds-sändare</p>			
<p><b>Vandring och passage:</b></p>       <p>Tidsinställd aktivitetslarm      Röstlarm      PIR Gardin sensor      PIR Mini sensor      Magnetbrytare      Sängmatta</p>					
<p><b>Larmmottagare:</b></p>       <p>AURORA      Junior      NORA      Sängvibrator      Kuddvibrator      IRIS</p>					

### Tekniska data

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 22  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50