

FlexiBlink - Telefonsändare

Bruksanvisning



Flexiblink Telefonsändare är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare att telefonen ringer.

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan användas för de flesta varseblivningsuppgifter i ett hem eller på en arbetsplats, och systemet är enkelt att installera.


Telefonsändaren aktiveras av en ringsignal på den analoga telefonlinjen eller på bredbandsmodemets analoga utgång.

Telefonsändaren använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

BATTERI OCH LADDNING:

Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer att enheten fungerar i många år. OBS! Ladda INTE batteriet.

ÖVERSIKT:

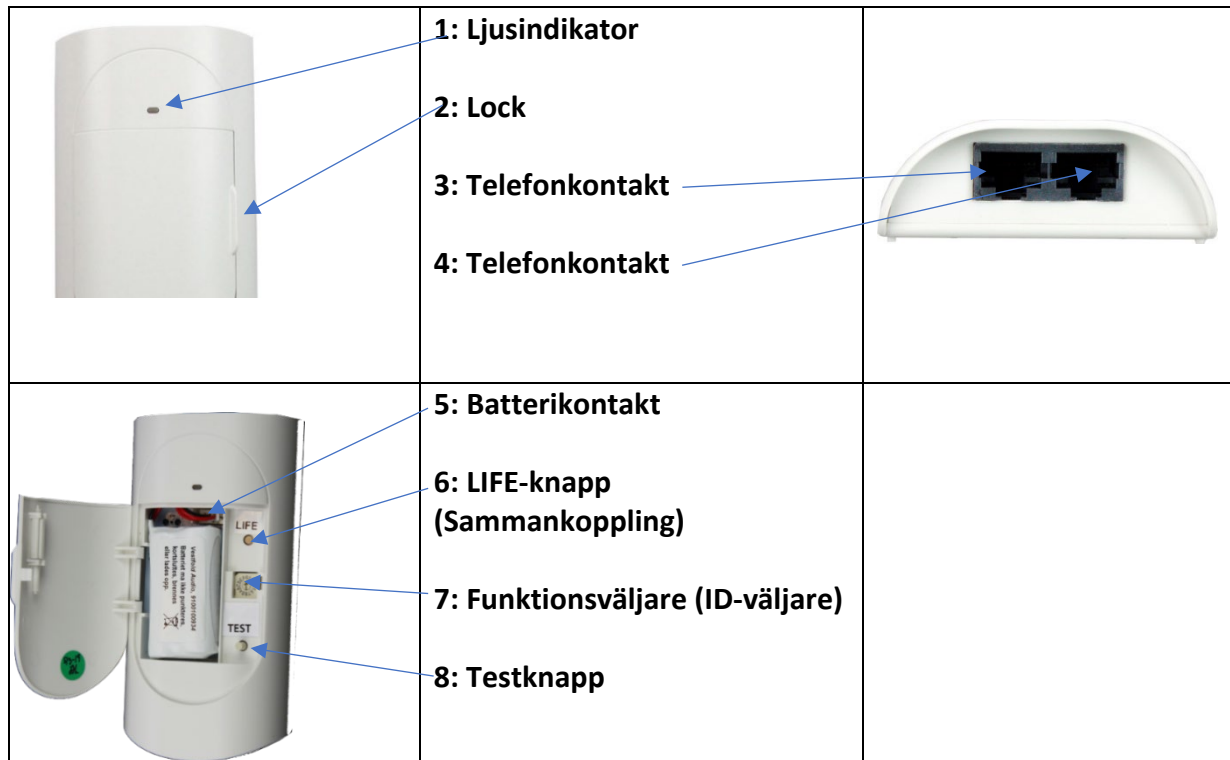

KOM I GÅNG:

Anslut batteriet till uttaget (5). Telefonsändaren kan blinka grönt i upp till några minuter medan batteriet förbereds för långvarig användning.

SAMMANKOPPLING:

Alla enheter i ett system måste sammankopplas före användning. OBS! Kontrollera om enheten redan är sammankopplad innan du utför den här proceduren.

1: Tryck två gånger på LIFE-knappen (7) på en av enheterna. Lysdioden (2) blinkar grönt.

2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Lysdioden blinkar grönt.

3: Sammankopplingen bekräftas av båda ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3



Art. Nr. 203471640

sekunder.

4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen (11) för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT EN ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM:

- 1: Tryck två gånger på LIFE-knappen på enheten i det befintliga systemet.
- 2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
- 3: Anslutningen bekräftas av ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
- 4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera sammankopplingen.

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN:

Tryck en gång på LIFE-knappen för att avbryta sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten är sammankopplingen misslyckad. Du måste återställa enheten innan du ansluter igen.

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN:

- 1: Tryck på LIFE-knappen fem gånger för att återställa sammankopplingen.

VÄLJ FUNKTION (ID-VÄLJARE)

Telefonsändare kan varna flera telefoner. Vrid funktionsväljaren till det läge som motsvarar det som ska meddelas i aviseringsmottagarna.

Använd den korta änden av verktyget som sitter i locket.

ID	VARNAR OM
0	Telefon
1	Telefon nr. 1
2	Telefon nr. 2
3	Telefon nr. 3
4	Telefon
5	Telefon nr. 1
6	Telefon nr. 2
7	Telefon nr. 3

TILLKOPPLING:

Den medföljande sladden ansluts mellan väggtelefonuttaget och ett telefonuttag i telefonsändaren. Kabeln från telefonen sätts in i det andra telefonuttaget i sändaren.



Art. Nr. 203471640

ID-val 0-3, upptäcker när telefonen besvaras. Denna funktion är beroende av att spänningsnivån på telefonlinjen ligger inom givna gränser. Om man upplever instabilitet med meddelandet med ID-väljaren i dessa positioner bör ID-val 4-7 användas.

MONTERING:

Telefonsändare monteras normalt på väggen med medföljande kardborreband. Använd den medföljande spritservetten för att rengöra väggen. Tryck fast de självhäftande ytorna ordentligt i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten skruvas fast i väggen genom monteringshålet under batteriet.

DAGLIG ANVÄNDNING:

LjUSDioder: När enheten är i drift visas statusen i ljusdioden på framsidan:

Släckt: Stand-by

Grönt: Meddelande skickas

Blinkande rött/grönt: Byt batteri

Ringsignalen på analoga telefonlinjer larmar med 1 sekunds ringning, följt av 4 sekunders tystnad. Om ID 4-7 används kan det ta upp till 6 sekunder från det att du lyfter luren tills mottagaren slutar meddela dig.

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Endast tillåten användning inom EU/EES. Produkten meddelar mottagarna om det är behov av batteribyte.

ÅTERVINNING:

Kassera inte produkten eller batteriet med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för bortskaffande av elektriska produkter.

SÄKERHET:

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Kortslut eller skruva inte isär produkten.

TEKNISK DATA:

Dim. (bxhxd)	69x133x27 mm	Temperatur	-10°C +40°C
Vikt m/batteri	140 g	Radiofrekvens	868.1 – 869.85 MHz
Sändarens effekt:	10 mW e.r.p.	Batteri	Litium 3 V

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överrensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING:

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Den meddelar inte i mottagare	Telefonsändare tar inte emot en signal från källan / den lyser inte grönt.	Tryck på testknappen och kontrollera om meddelandet visas.
	Kontakten är inte korrekt ansluten	Kontrollera att kontakten sitter ordentligt fast
	Avståndet mellan Telefonsändare och mottagaren är för stort.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt i en repeater.
	Batteriet i Telefonsändaren är tomt / det blinkar rött.	Byt batteri.
	Telefonsändare saknar batteri	Sätt i batteriet.
Parkoppling fungerar inte	Båda enheterna har parats ihop tidigare. Det blinkar rött.	Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten som ska läggas till.
Efter TEST-tryck lyser sändaren rött	Enheten är inte ihopkopplad med någon	Anslut enheten till en mottagare
Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan orange under lång tid	Ingen mottagare är ihopkopplad med sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återkoppla. Försök igen
Det meddelar för kort tid	ID-väljaren står i pos. 0-3	Ange ID-väljaren i pos. 4-7
Den varnar med fel signal i mottagare.	Funktionsväljaren (ID) är i fel position.	Vrid funktionsväljaren till rätt position.
Det blinkar rött/grönt i Telefonsändaren	Batteriet tar snart slut.	Byt batteri
Den varnar med fel signal i mottagare.	Funktionsväljaren (ID) är i fel position.	Vrid funktionsväljaren till rätt position.



VARNING:

Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet.

