

Tryckknappssändare Produktblad



FlexiBlink Tryckknappssändare, är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att meddela/larma FlexiBlink LIFE-mottagare. Den kan användas både inomhus och utomhus.

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan användas för de flesta varnings/larmuppgifter inom en bostad eller arbetsplats, och systemet är enkelt att installera.

Tryckknappssändaren kan t.ex. meddela/larma dörrklocka, sjuksignal eller önskad assistans. Dessutom har Tryckknappssändaren möjlighet att skicka allmänna larm och notiser som kan anpassas i IRIS LIFE och Flexiblink App-sändare.

Tryckknappssändaren använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

Sammankoppling

1. Håll in larmknappen på ELLA i ca 10 sekunder tills den kvitterar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck 1 gång på larmknappen på ELLA. Indikatorlampan blinkar då grönt.
3. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen du vill sammankoppla ELLA med. Indikatorlampan blinkar då grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och mottagare.

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck två gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan på ELLA blinkar grönt.
3. Tryck en gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan på den enheten blinkar grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.
Då måste du återställa enheten och prova igen.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer.
2. Tryck fem gånger på varningsknappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

ID-väljare

ID	MEDDELANDE/LARM	SIGNAL-TYP	ID	MEDDELANDE/LARM	SIGNAL-TYP
0	Det ringer på dörren	Daglig	9	Allmänt	Larm
1	Det ringer på ytterdörren	Daglig	A	Barnet har stigit upp	Daglig
2	Det ringer på dörr nr 2	Daglig	B	Talad klocka (från IRIS)	Daglig
3	Sjuk signal	Daglig	C		
4	Sjuk signal 2	Daglig	D		
5	Hjälp önskas	Daglig	E		
6	Hjälp mig nu!	Larm	F		
7	Kom snart!	Daglig			
8	Allmänt	Daglig			



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471645

Relaterade produkter:

Annan larm og kallelse:				
				
Ella smycke-sändare	Armbands-larm sändare och -mottagare	Barnvakt	Välfärds-sändare	Tryckknapps-sändare

Larmmottagare:					
					
IRIS	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	AURORA

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	64x100x20mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C