



ICAP  
Individual Computer Applications

Art. 203471652

# FlexiBlink - Junior Tillkallning

## Bruksanvisning



JUNIOR Tillkallning är en produkt i FlexiBlink LIFE-familjen.

JUNIOR Tillkallning är avsedd för vårdgivare som ansvarar för brukare som behöver tillsyn.

Den anger 5 specifika anmälningsskäl, samt att ha en "gemensam" anmälan av andra anmälningsskäl.

Du kan ha JUNIOR Tillkallning i fickan eller ha den runt i halsen i halssnöret.

JUNIOR Tillkallning är uppladdningsbar och batteriet håller normalt i ca 2 dygn.

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 42  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50

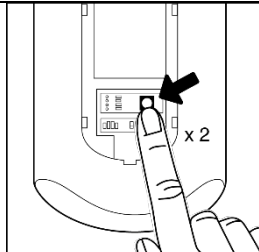
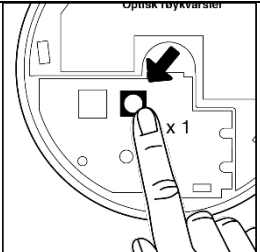
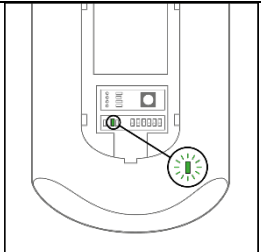


	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Fäste för halsnöre</li><li>(2) På/Av-knapp</li><li>(3) Stoppknapp</li><li>(4) Varning för låg batterinivå (rött ljus)</li><li>(5) 6 varningslampor med ikoner</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>(6) Funktionsbrytare</li><li>(7) Service-kontakt</li><li>(8) LIFE-knapp (sammankoppling)</li><li>(9) Grön/Röd lysdiod för sammankoppling</li></ul>

## 1. SAMMANKOPPLA ENHETER

Alla FlexiBlink LIFE som ska fungera tillsammans, måste sammankopplas. Det gör du genom att trycka på LIFE-knappen.

Den finns under locket på baksidan av JUNIOR Tillkallning. Se illustration pkt. 8. Använd en liten skruvmejsel eller liknande för att lyfta av locket.

		
<p>1. Tryck två gånger på LIFE-knappen på en av enheterna. - här är LIFE-knappen illustrerad med en FlexiBlink LIFE röklarm.</p>	<p>2. Tryck en gång på LIFE-knappen på JUNIOR Tillkallning. (Omvänd ordning är möjligt.) Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>4. Anslutningen bekräftas av att indikatorn lyser grönt i 2-3 sekunder. Enheterna är färdiga att användas. Tryck på «Test»-knappen på den ena sändaren för att kontrollera anslutningen.</p>

## ANSLUTNING AV EN NY ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM

1. Tryck två gånger på LIFE-knappen på enhet från det befintliga system.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Anslutningen bekräftas av att indikatorlamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är färdiga att användas. Tryck på «Test»-knappen på en sändare för att kontrollera anslutningen.

## ANSLUTNINGEN MISSLYCKADES

Om enheten lyser rött vid försök av anslutning, så misslyckades den. Då måste du återställa enheten och prova igen.

## AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

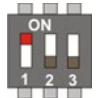
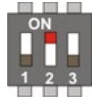
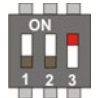
Tryck en gång på LIFE-knappen för att avbryta sammankopplingen



## ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN

Tryck fem gånger på LIFE-knappen på enheten du önskar sammankopplingen ska raderas från. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

## 2. SPECIALFUNKTIONER

	<b>ALLTID STARK VIBRATION</b> Funktionsbrytare 1 upp.
	<b>GRANNALARM</b> För att få grannalarm i FlexiBlink LIFE-systemet, måste en IRIS LIFE användas för installation. Sedan blir alla varningsmottagare inställda på att meddela brand eller inbrott hos de aktuella grannarna. Om du inte önskar att JUNIOR-L ska varna från ev grannar, kan du skjuta upp brytare 2. JUNIOR-L kopplas då bort grannalarm.
	<b>KUDDVIBRATOR</b> Funktionsbrytare 3 upp. JUNIOR kan användas som en liten kuddvibrator för att väcka dig i tid, när den används tillsammans med IRIS Touch-mottagaren. När väckarklockan startar i IRIS Touch, kommer den sända trådlösa signaler som kan få JUNIOR att vibrera.


## 3. ANVÄNDNING

### Laddning

Innan JUNIOR Tillkallning används och vid behov, måste batteriet laddas med den medföljande laddaren. När lampan i batterisymbolen (4) blinkar, är det ca 6 timmar som återstår av batteriet.

JUNIOR Tillkallning kommer att påminna dig ca 1 gång i timmen om att den är i behov av laddning, detta gör den med en kort vibration och ett pip (om ljudvarning är påslagen). Det lyser konstant rött i (4) så länge laddningen pågår.

## Varningar

Varningsorsak	Ljus i symbol	Vibrations-mönster		
Kom nu	1	Korta pulser	1	4
Kom snart	2	Långa pulser		
Signal 1 (betydelse avtalas med brukare)	3	Korta pulser		
Signal 2 (betydelse avtalas med brukare)	4	Långa pulser	2	5
Epilepsi	5	Korta pulser		
Andra larm	6	Långa pulser	3	6

Vid varning, blinkar lampan vid en symbol samtidigt som vibrationen startar. Om två varningar kommer nära varandra, visas det äldsta meddelandet med fast lampa.

Ljus i symbolerna tillsammans med vibrationer används för att ange orsaken till varningen. Om vibrationsvarningen är avstängd kommer lamporna att indikera huvudorsaken.

### Stoppa en varning

Tryck en gång på Stoppknappen för att stoppa varningen. Lampan vid symbolen fortsätter att blinka i 45 sekunder eller till du trycker på Stoppknappen igen.

### Ljudvarning AV

Tryck på stoppknappen och håll den ned i ca 2 sekunder, till du får en bekräftelse av JUNIOR Tillkallning med 2 korta pip, från och med nu varnar den inte med ljud.

### Ljudvarning PÅ

Tryck på stoppknappen och håll den ned i ca 2 sekunder, till du får en bekräftelse av JUNIOR med ett långt pip, från och med nu varnar den med ljud.

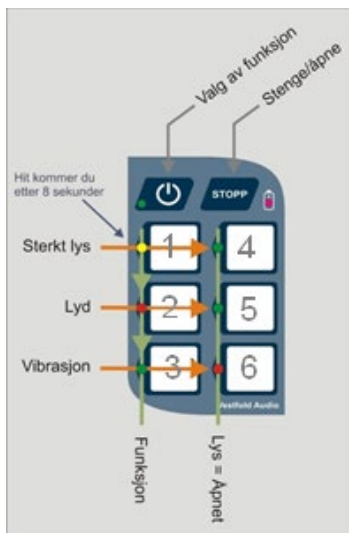
### VÄLJ VARNINGSMETOD

Det är möjligt att välja om JUNIOR Tillkallning ska varna med vibration, ljud, ljus eller en kombination av dessa.

OBS! Om du oavsiktligt skulle blockerar alla tre former av varningar (ljus, ljud och vibration), kommer JUNIOR Tillkallning av säkerhetsmässiga orsaker ändå varna med vibration och markera händelsen med en symbol.

#### 4. Varningsmenyn

1. JUNIOR Tillkallning ska vara avstängd.
2. Håll ned Strömknappen till lampan till den första symbolen tänds. Samtidigt som du ser en blinkning i det starka ljuset. Då släpper du Strömknappen.
3. JUNIOR Tillkallning utför nu en självttest i 8 sekunder.
4. När det lyser vid symbol nr. 1, kan du välja om det ska varna med starkt ljus. Tryck på Stopp-knappen för att välja på/av. Funktionen är PÅ när det lyser i symbol nr. 4.
5. Tryck en gång till på strömknappen.
6. När det lyser vid symbol nr. 2, kan du välja om det ska varnas med ljud. Tryck på Stopp-knappen för att välja på/av. Funktionen är PÅ när det lyser vid symbol nr 5.
7. Tryck en gång till på strömknappen.
8. När det lyser vid symbol nr. 3, kan du välja om det ska varnas med vibration. Tryck på Stopp-knappen för att välja på/av Funktionen är PÅ när det lyser i symbol nr 6.
9. Tryck en gång till på strömknappen för att avsluta proceduren.





Art. 203471652

## 5. ÅTERGÅ TILL FABRIKSINSTÄLLNING

På ett enkelt sätt kan du återställa (reset) JUNIOR3 till det ursprungliga inställningar:

1. JUNIOR Tillkallning ska vara påslagen.
2. Håll Strömknappen och Stoppknappen ned samtidigt i ca 10 sekunder till

JUNIOR Tillkallning bekräftar med:

- En blinkning av alla lampor i membranpanelen
- En blinkning med det starka ljuset
- Ljudsignal
- Vibration

Detta händer samtidigt, och tar ca 1 sekund. Så stänger JUNIOR Tillkallning av automatiskt.

## 6. VIKTIG INFORMATION

### Säkerhet

Undvika att utsätta produkten för lågor och andra direkta värmekällor.

Produkten får inte kortslutas eller skruvas loss.

Produkten får inte doppas i vatten eller utsättas för vattenstänk/regn.

### Rengöring

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

### Återvinning

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med korrekt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.

### Användningsbegränsningar:

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

## TEKNISK DATA

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	200 g	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz		

## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att JUNIOR överensstämmer med direktiven (MDR) 2017/745.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

[upphandlingar@icap.nu](mailto:upphandlingar@icap.nu)

## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Det varnar inte i JUNIOR Tillkallning	JUNIOR Tillkallning är inte påslagen.	Tryck på Strömknappen och se om det kommer ljus i knappen.
	JUNIOR Tillkallning saknar ström.	Sätt enheten på laddning.
	Avståndet mellan JUNIOR Tillkallning och sänder är för stor.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt in en repeater.
	JUNIOR Tillkallning och sändaren(a) är inte sammankopplad.	Utför sammankoppling.
Efter TEST-tryck, lyser sändaren rött	Enheten är inte ansluten	Anslut enheten till en mottagare.
Efter TEST-tryck, lyser sändaren grönt länge, därefter orange	Ingen mottagare är ansluten med sändaren	Kontrollera att det är en mottagare i systemet. Återställ enheten. Anslut på nytt och prova igen
Anslutningen fungerar inte	Enheten har varit sammankopplad tidigare. Den blinkar rött.	Tryck 5 gånger på LIFE-knappen på den enhet som ska läggas till.
Falsk varning	Känsligheten hos en akustisk sensor/ sändare är för hög.	Reducera känsligheten.

För att ansöka om hjälp från ICAP AB, kan du skicka ett mejl till [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu) eller ringa oss på telefon: 010-405 68 50

