



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr.: 203471645

FlexiBlink Tryckknappssändare

Bruksanvisning



FlexiBlink Tryckknappssändare, är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att meddela/larma FlexiBlink LIFE-mottagare. Den kan användas både inomhus och utomhus.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG



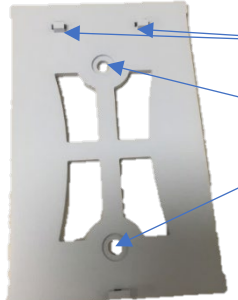
E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan användas för de flesta varnings/larmuppgifter inom en bostad eller arbetsplats, och systemet är enkelt att installera.

Tryckknappssändaren kan t.ex. meddela/larma dörrklocka, sjuksignal eller önskad assistans. Dessutom har Tryckknappssändaren möjlighet att skicka allmänna larm och notiser som kan anpassas i IRIS LIFE och Flexiblink Apsändare.

Tryckknappssändaren använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

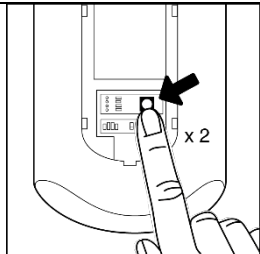
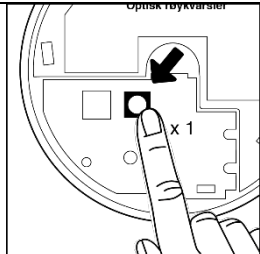
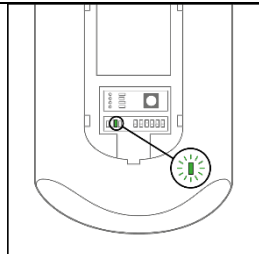
| | |
|---|--|
|  | <p>1. Tryckknapp med ljusindikator</p> |
|  | <p>3. Funktionsväljare (ID-väljare) 4. LIFE-knapp (sammankoppling)</p> |
|  | <p>5. Tryckknappssändarfäste 6. Skruvhål för montering av fäste</p> |

BATTERI OCH LADDNING:

Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer driften av enheten i många år. Ladda inte batteriet.

SAMMANKOPPLING

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som fungerar tillsammans måste sammankopplas, det görs genom att trycka på LIFE-knappen. Den finns under det svarta locket på baksidan av Tryckknappssändaren.

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på den ena enheten.</p> | <p>2. Tryck på LIFE-knappen på den andra enheten 1 gång. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p> | <p>3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser med ett fast ljus i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p> |

SAMMANKOPPLING AV NY ENHET MED BEFINTLIGT SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från befintligt system 2 gånger.
2. Tryck på LIFE-knappen på den nya enheten 1 gång.
3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten, är sammankopplingen misslyckad. Återställ enheten innan du provar sammankoppla på nytt. (Se nedan).



Art. Nr.: 203471645

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

För att avbryta en sammankoppling, tryck på LIFE-knappen 1 gång.

NOLLSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN

Tryck på LIFE-knappen på enheten där sammankopplingen ska raderas 5 gånger. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet "Utökade funktioner".

VÄLJ FUNKTION (ID-väljare)

Flexiknapp har flera inbyggda notiser. Vrid funktionsväljaren (3: e) till den position som matchar vad som ska meddelas/larmas i mottagarna.

| ID | MEDDELANDE/LARM | SIGNAL-TYP | ID | MEDDELANDE/LARM | SIGNAL-TYP |
|----|---------------------------|------------|----|--------------------------|------------|
| 0 | Det ringer på dörren | Daglig | 9 | Allmänt | Larm |
| 1 | Det ringer på ytterdörren | Daglig | A | Barnet har stigit upp | Daglig |
| 2 | Det ringer på dörr nr 2 | Daglig | B | Talad klocka (från IRIS) | Daglig |
| 3 | Sjuk signal | Daglig | C | | |
| 4 | Sjuk signal 2 | Daglig | D | | |
| 5 | Hjälp önskas | Daglig | E | | |
| 6 | Hjälp mig nu! | Larm | F | | |
| 7 | Kom snart! | Daglig | | | |
| 8 | Allmänt | Daglig | | | |

BYTA UT/SÄTTA I BATTERIET

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50



Öppna Tryckknappssändaren genom att skruva loss de fyra skruvarna på baksidan

Sätt i batteriet i batterikontakten.

När du ansluter ett batteri kan Tryckknappssändaren blinka grönt i upp till ett par minuter medan batteriet förbereds för långvarig användning.

Stäng Tryckknappssändaren och skruva in de fyra skruvarna på baksidan innan den monteras.

Obs! Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet.

MONTERING

Utomhus: Använd väggfästet som följer med och skruva fast det på väggen. Flexiknappen knäpps sedan på plats i fästet.

Inomhus: Tryckknappssändaren monteras oftast på en vägg med den medföljande kardborrebandet. Använd den medföljande spritservetten för att rengöra väggen där Tryckknappssändaren ska monteras. Tryck fast limytan på kardborrebandet ordentligt på väggen i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten monteras med väggfästet som för utomhusinstallation.

I BRUK:

När enheten är i drift visas statusen i ljusindikatorn på framsidan:

Släckt: Stand-by

Grön: Meddelande/larm skickat

Blinkar rött/grönt: Byt batteri

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk i icke-kondenserande miljö.

Produkten kommer att meddela mottagarna om behovet av ett batteribyte om du har mottagare som visar detta.

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Får endast användas inom EU/EES.



Art. Nr.: 203471645

ÅTERVINNING

Kasta inte produkten med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för deponering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Skruva inte isär produkten.

TEKNISKA DATA

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Dim. (bxhxd): | 64x100x20mm | Sändareffekt: | 10 mW e.r.p. |
| Vikt: | 140 g | Batteri: | Litium 3V |
| Radiofrekvens: | 868.1 – 869.85 MHz | Temperatur: | -10 °C - +40 °C |

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr.: 203471645

FELSÖKNING

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--|---|---|
| Mottagarna meddelas/larmas inte | Flexiknapp lyser inte grönt. | Byt batteri. |
| | Flexiknapp saknar batteri | Sätt i ett batteri. |
| | Avståndet mellan Tryckknappssändaren och mottagaren är för stor. | Flytta enheterna närmare varandra eller sätt in en repeater. |
| | Batteriet i Flexi-knappen är tomt / det blinkar rött. | Byt batteri. |
| Det meddelas/larmas med en felaktig signal i mottagare. | Funktionsväljaren (ID) är i fel position. | Vrid funktionsväljaren till rätt position. |
| Den blinkar rött/grönt i Flexiknapp | Batteriet i Tryckknappssändaren tar snart slut. | Byt batteri |
| Efter TEST-tryck, lyser sändaren rött | Enheten är inte sammankopplad | Anslut din enhet till en mottagare |
| Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan länge orange | Ingen mottagare är sammankopplad med sändaren | Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återkoppla. Försök igen |
| Sammankoppling fungerar inte | Båda enheterna har varit sammankopplad tidigare - Det blinkar rött. | Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten som ska läggas till. |

