


Portabel Digital Röstförstärkare

EchoVoice® EV7™

Bruksanvisning

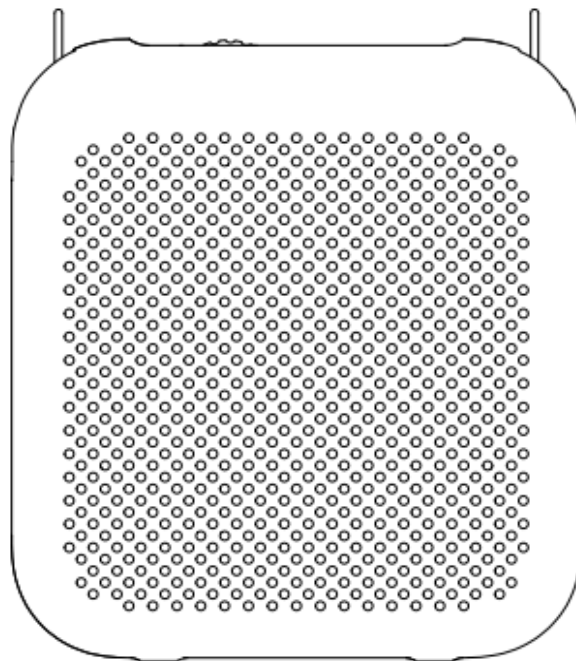


EchoVoice® EV7™ är en kompakt och lätt digital röstförstärkare. Produkten kan förstärka även mycket svaga röster med minimal ansträngning. EchoVoice® EV7™ har en maximal uteffekt på 10 W och drivs av ett batteri på 4000 mAh, vilket ger mycket lång drifttid (upp till 35 timmar).





Produktens funktionella egenskaper

1. Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri med hög kapacitet, 4000 mAh.
2. Levereras med lätt huvudburen bommikrofon.
3. Digital förstärkningsteknik, nominell effekt 5 W och maximal effekt upp till 10 W.
4. Högpresterande dubbel NdFeB-högtalare med skumkant för ljud av hög kvalitet.
5. USB-C-gränssnitt, kan laddas med 5 V strömförsörjning eller via datorns USB-port.
6. Enkel och lättanvänd volymkontroll.
7. Stöd för AUX-in samt uppspelning av MP3-, WMA- och WAV-filer.
8. Elegant och modern design, bekväm, enkla funktioner, enkel användning och lätt att bära – exempelvis över axeln eller i midjan.

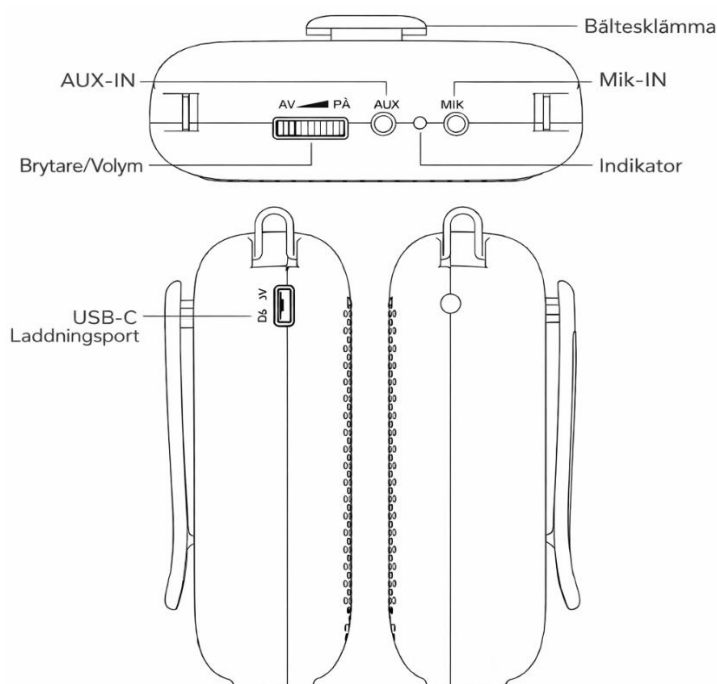Funktionsöversikt:



Knappar och anslutningar:

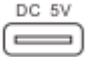
	Mic-in	Mikrofoningång för 3,5 mm mono/stereo mikrofon.
	AUX-in	När ljudkabel ansluts startar uppspelning automatiskt.
	USB-C Laddningsport	Laddningsport stödjer laddning via 5 V nätaggregat eller datorns USB-port.
	Vridreglage – Volym/Ström	Genom att vrida reglaget slås förstärkaren på eller av samt justeras volymen. Vrid medurs för att slå på förstärkaren och öka volymen. Vrid moturs för att sänka volymen tills enheten stängs av.

Användnings instruktion:

1. **Ström på/av:** Vrid volym-/strömbrytaren medurs för att slå PÅ förstärkaren. När förstärkaren är på tänds den röda LED-indikatorn. Vrid reglaget moturs för att stänga AV förstärkaren.
2. **Volymkontroll:** Vrid volym-/strömbrytaren för att justera volymen till en bekväm nivå. Medurs ökar volymen, moturs minskar volymen.
3. **Mikrofonförstärkning:** Stäng alltid AV förstärkaren innan mikrofonen ansluts. Placera mikrofonen över huvudet (bommikrofon) eller på halsen (strupmikrofon). Justera mikrofonens position och håll minst 50 cm avstånd mellan mikrofon och förstärkare för att undvika rundgång. Anslut därefter mikrofonen till mikrofonuttaget och slå PÅ förstärkaren. För korrekt placering av strupmikrofonen: placera pekfingeret i örat och för det sedan mot halsen. När du når mitten av halsen, oftast vid den så kallade "mjuka punkten", uppnås bäst förstärkning. Placera mikrofonen ovanför denna punkt. Börja med låg volym och höj gradvis.
4. **AUX-läge:** För att ansluta förstärkaren till en extern ljudkälla, använd AUX-IN-uttaget. Förstärkaren kan anslutas till datorer, mobiltelefoner, surfplattor, MP3-, MP4-spelare eller andra enheter via 3,5 mm AUX-kabel. **Anslut aldrig externa ljudkällor till mikrofoningången, då detta kan skada förstärkaren.**
5. **Laddning:** Förstärkaren laddas med USB-C-kabel. Den kan laddas med den medföljande USB-nätadaptern (rekommenderas), via datorns USB-port (5 V), mobiltelefonladdare (5 V) eller powerbank (5 V).
LED-indikatorn blinkar en gång per sekund under laddning. När batteriet är laddat till 80 % lyser LED-lampan med fast sken. För full laddning, fortsätt ladda i ytterligare en timme. LED-lampan blinkar snabbt när batterinivån är låg och indikerar att enheten behöver laddas.

Montering på bälte eller montering av Bärrem

1. För att montera enheten på ett bälte – trä bältesklämman (1) över bältet och se till att enheten sitter fast ordentligt
2. För att bära enheten med bärremmen – fäst bärremmen i de båda öglorna (2) och se till att den sitter ordentligt. Justera remmens längd genom att flytta metallspännet och anpassa remmens längd för att passa över axeln eller runt midjan. **Varning! Akta så att remmen inte kan fastna och orsaka strypningsrisk!**

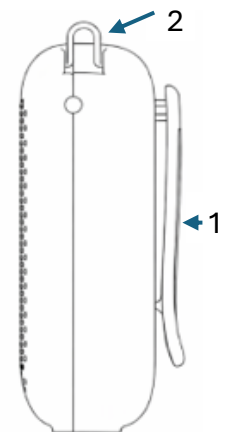

Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder

1. Följ instruktionerna steg för steg noggrant.
2. Mikrofonen ska placeras 0,5–1 cm från användarens mun. Ta inte bort vindskyddet i skum, då det reducerar brus och gör rösten tydligare.
3. Placera inte mikrofonen för nära röstförstärkaren eftersom detta kan orsaka rundgång. Se till att mikrofonen är riktad mot användarens mun.
4. EchoVoice® EV7™ får endast laddas med 5 V strömkälla. Högre spänning kan skada förstärkaren.
5. Ladda förstärkaren fullt före första användning för att förlänga batteriets livslängd.

6. Använd inte produkten i fuktiga, våta, mycket varma eller mycket kalla miljöer.
7. För rengöring eller rekonditionering av EchoVoice® EV7™ och dess tillbehör, använd endast en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel/desinfektionsmedel.
8. Vi rekommenderar att använda den nätadapter som godkänts av Hearing Products och som medföljer röstförstärkaren.
9. **Varning!** Akta så att bärremmen inte kan fastna och orsaka strykningsrisk!
10. Anslut aldrig externa ljudsignaler till mikrofonuttaget.
11. Vid användning av EchoVoice® EV7™ ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för elektriska stötar eller personskador.
12. All service ska utföras av kvalificerad personal. Försök inte att öppna enheten – detta ogiltigförklarar garantin.
13. Obs: Om serienummer eller etiketter tas bort upphör garantin att gälla.

Innehåll i förpackningen (EchoVoice EV7 Set SE):

1. EchoVoice® EV7™ förstärkare × 1
2. 3,5 mm ljudkabel × 1
3. USB-C-kabel × 1
4. Huvudburen bommikrofon × 1
5. Bärrem × 1
6. USB-nätadapter 5 V 2 A × 1
7. Bruksanvisning × 1

Produktspecifikation:

1. Tekniskspecifikation

Nominell effekt	5W	Max power	10W
Högtalare	3 tum, 2 ohm magnetisk högtalare	Frekvensomfång	120Hz – 15KHz
Batteri	3,7 V / 4000mAh, 2 litiumbatterier parallellkopplade	Laddningsspänning	USB/DC 5V, minst 1A
Laddningstid	4-6 timmar	Användningstid	Upp till 35-38 timmar
Mått	91,1x101,5x37,8 mm	Nettovikt	205,5 g

Reservdelar/tillbehör:

Produkt :	Artikelnummer:
EchoVoice® EV7™ förstärkare	4801
USB-nätadapter 5 V 2 A	570-1012-01
Bommikrofon	480-1004-01
Strupmikrofon	482
Myggmikrofon	202
Ljudkabel	910-1005-01
USB-C laddningskabel	EV7-USB
Bärrem	EV7-BR
Mikrofonskydd	EV7-MS
Box	EV7-BOX



**Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater
(gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda
insamlingssystem)**

Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, ska den inte hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till ett lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas på rätt sätt, hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors hälsa, som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av denna produkt. Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser. För att få närmare information om återvinning av denna produkt, kan du kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller den butik där du köpte produkten.

Hearing Products International Limited

House, 26/27 Haigh Park, Stockport, SK4 1QR, England

Tel: +44 (0) 161 480 8003

Fax: +44 (0) 161 480 8006

www.hear4you.com

Hearing Products International Limited förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra priser, design, tekniska specifikationer eller färger.

EchoVoice® instruktioner © Copyright Hearing Products International Limited.

E & O.E 05/21. Version 1.